

BrightTonix

Y10



Шаг за шагом

Омоложение полости рта

Быстрее: Отбеливание зубов проводится в течение 15-30 минут, по сравнению со средней продолжительностью в один час при текущих методах.

Безопаснее: Устраняет потенциальные риски от злоупотребления или плохого применения во время последующих процедур дома и предотвращает побочные эффекты, связанные с перекисью водорода.

Белее: Эффективно отбеливает даже очень темные или светлые пятна, которые, как известно, трудно отбелить с помощью существующих методов. Из-за отсутствия перекиси водорода наше лечение может выполняться часто, чтобы сохранять отбеливающий эффект.


Технология

Технология Y10 обеспечивает результаты лечения на уровне профессионального лечения. Лечение можно повторять по мере необходимости. Использование ВЧ электрического поля с определенной временной и частотной характеристикой (функцией времени и / или частоты) и уникальной зубной пасты Y10 во время сеанса лечения обеспечивает заметное отбеливание на несколько тонов в соответствии с общей классификацией тонов.

Весь сеанс лечения относительно короткий, что экономит драгоценное время пребывания в кресле, и нет необходимости в сильных окислителях в отбеливающем веществе.

Важные рекомендации по лечению / 1

- Следите за тем, чтобы голова пациента была слегка наклонена к спине, как описано в следующем эскизе: →
- Пожалуйста, убедитесь, что пациент не слишком сильно сжимает капу и не жуёт ее.

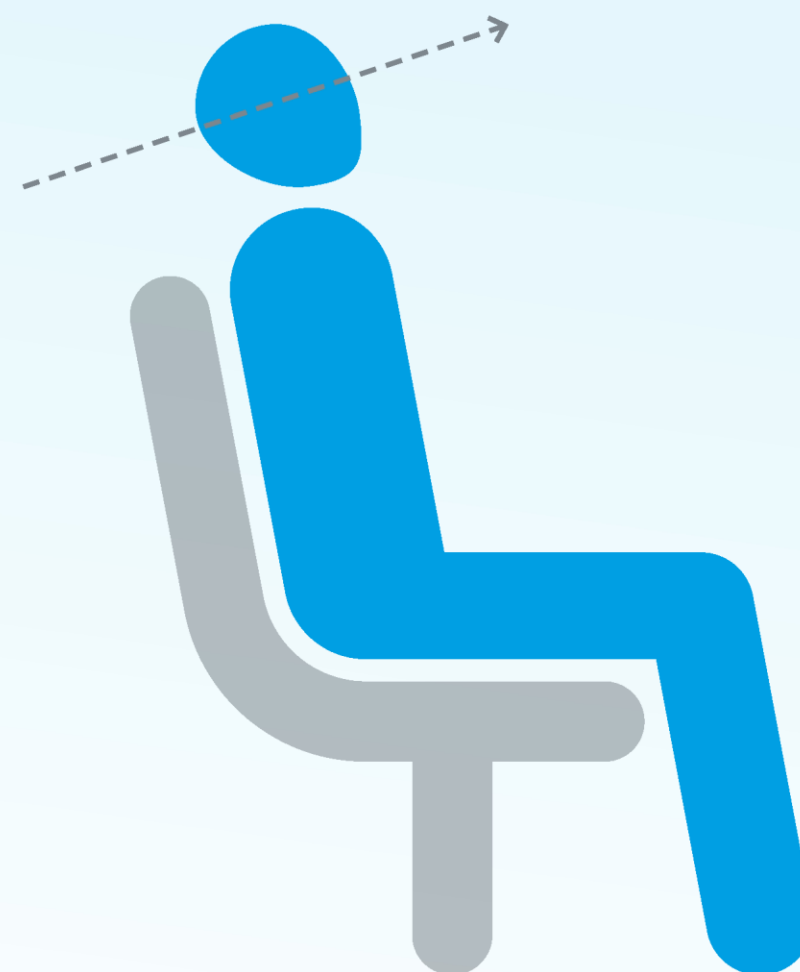

Важные рекомендации по лечению / 2

- Пожалуйста, убедитесь, что зубная паста была охлаждена в течение как минимум часа до лечения.

! Не используйте устройство Y10 с любой зубной пастой, кроме зубной пасты Y10.

- Обязательно заполните обе стороны капы правильной пропорцией зубной пасты, как показано на следующих рисунках: →

! Помещение недостаточного количества зубной пасты в капю может привести к слишком быстрому нагреванию зубной пасты.




Зубная паста должна заполнить всю полость электрода капы с обеих сторон, чтобы достичь следующей отметки: ↓



Важные рекомендации по лечению / 3


Не используйте устройство Y10 в случае:

- Имплантированный кардиостимулятор
 - Внутренний дефибриллятор, кардиостимулятор или любые другие активные электрические устройства в любом месте тела
 - Нарушения свертываемости крови
 - Цирроз
 - Сосудистые заболевания
 - Саркоидоз
 - Активный гепатит
 - Активное воспаление или инфекция
 - Недавняя хирургическая процедура
 - Текущее онкологическое заболевание или лейкемия или эти заболевания в анамнезе
 - Плохо контролируемые эндокринные расстройства, такие как диабет
 - Металлические брекеты или фиксаторы
 - Беременность или грудное вскармливание
 - Аутоиммунные заболевания, такие как СПИД или ВИЧ
 - Недавние эстетические инъекции вокруг области рта
 - Пациент моложе 18 лет
- По усмотрению врача, воздержитесь от лечения в любом состоянии, которое может сделать его небезопасным для пациента.**

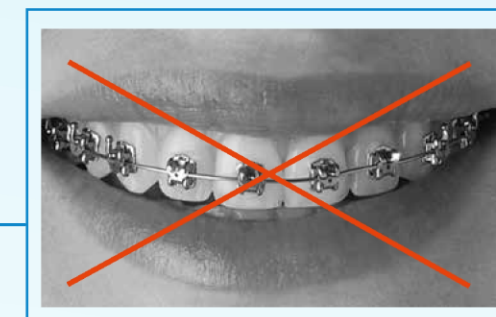

Подготовительный шаг

Перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Для работы Y10 требуются следующие элементы:

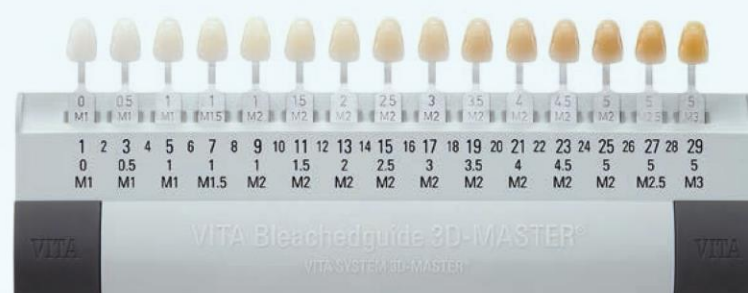

VITA 3D-MASTER гид по отбеливанию




ВНИМАНИЕ: В зависимости от ключа активации, который вы получили с устройством Y10



Шаг 1 - Подключение системы Y10

Подсоедините кабель аппликатора к соответствующему порту подключения.

Затем подключите кабеля питания системы к источнику питания. Наконец, подключите ключ активации к соответствующему соединению, как описано:

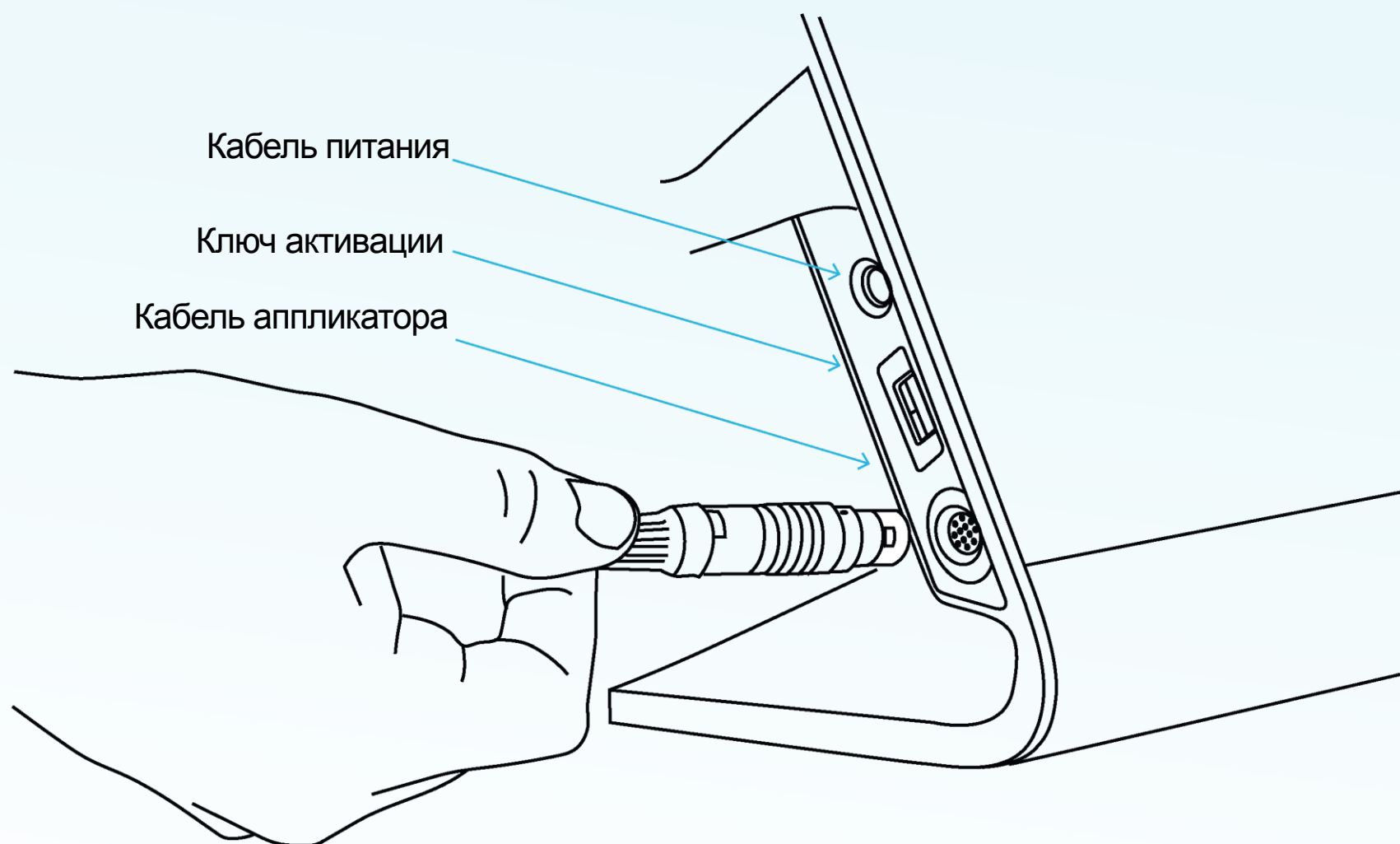

ВНИМАНИЕ: В зависимости от ключа активации, который вы получили с устройством Y10

Шаг 2 - Инициализация системы Y10

Для инициализации устройства нажмите кнопку в нижней части экрана. Примерно через 20 секунд появится главное меню.





Кнопка включения / выключения

Шаг 3 - Лицензирование системы

Обратитесь к дистрибьютору продуктов BrightTonix, чтобы получить лицензионный ключ. Чтобы обновить лицензионный ключ системы:

- Нажмите кнопку «Лицензирование» на экране, появится экран «Лицензирование».
- Нажмите кнопку.
- Введите новый лицензионный ключ, полученный у местного дистрибьютора, вводом на виртуальной клавиатуре.
- Нажмите кнопку, теперь обновляется лицензионный ключ.


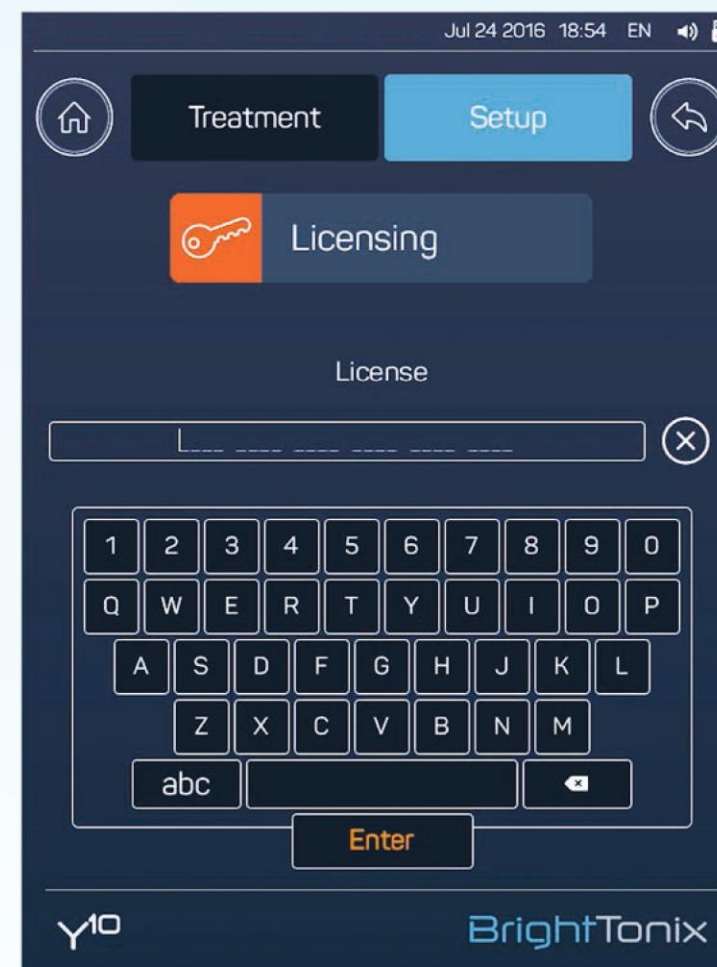
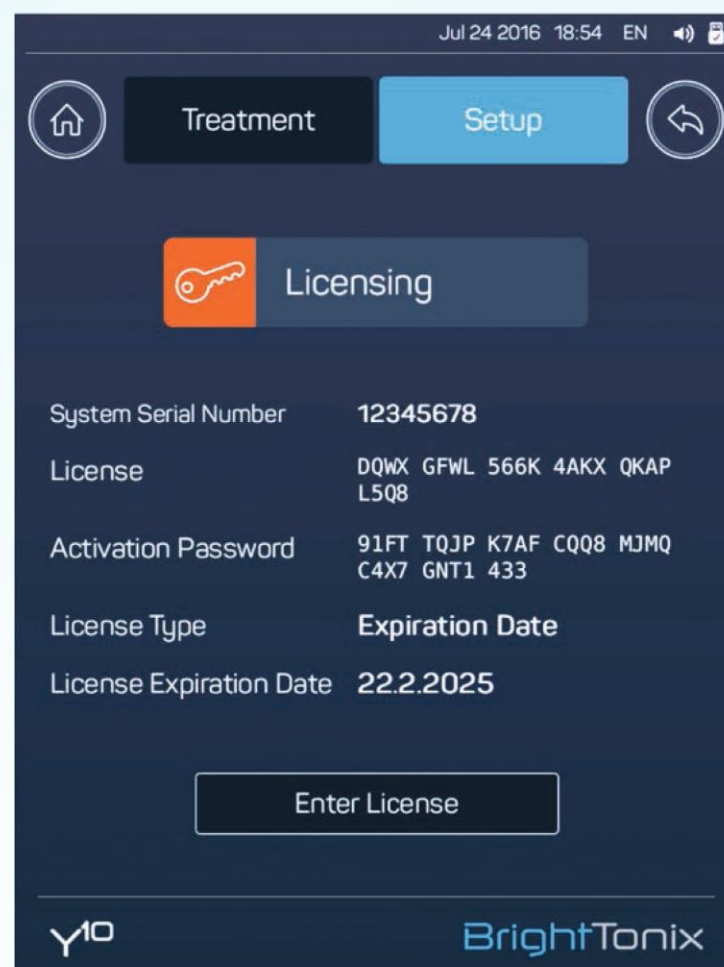


ВНИМАНИЕ: Система BrightTonix настроена на работу с текущей лицензией на заранее определенное время. По истечении этого периода система перестанет работать на лечение, и появится всплывающее окно, требующее ввода нового лицензионного ключа.

Шаг 4 - Настройка системы

Чтобы настроить системные операции, нажмите кнопку на экране. Появится экран конфигурации системы.

Затем нажмите кнопку «Общие» - появится экран «Вторичная настройка».

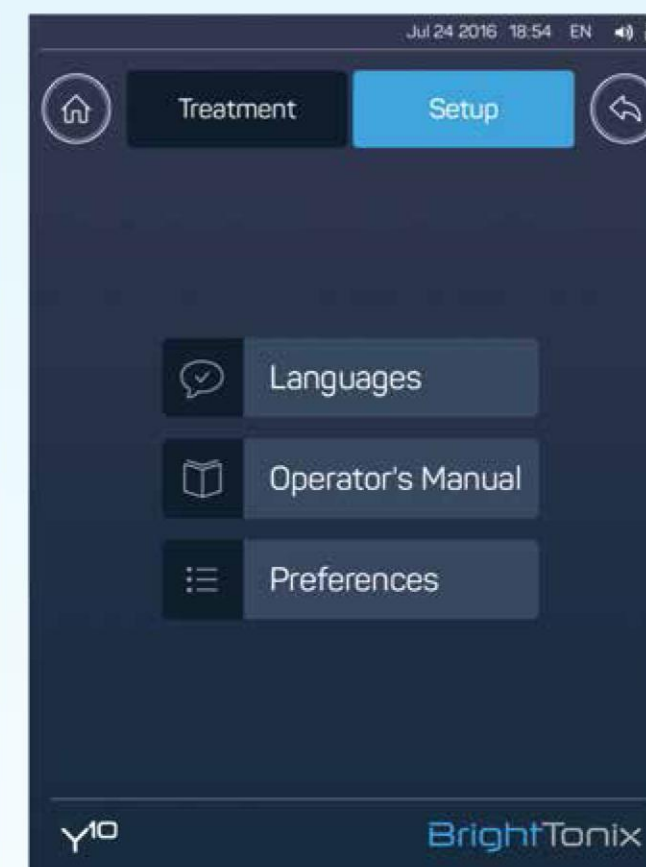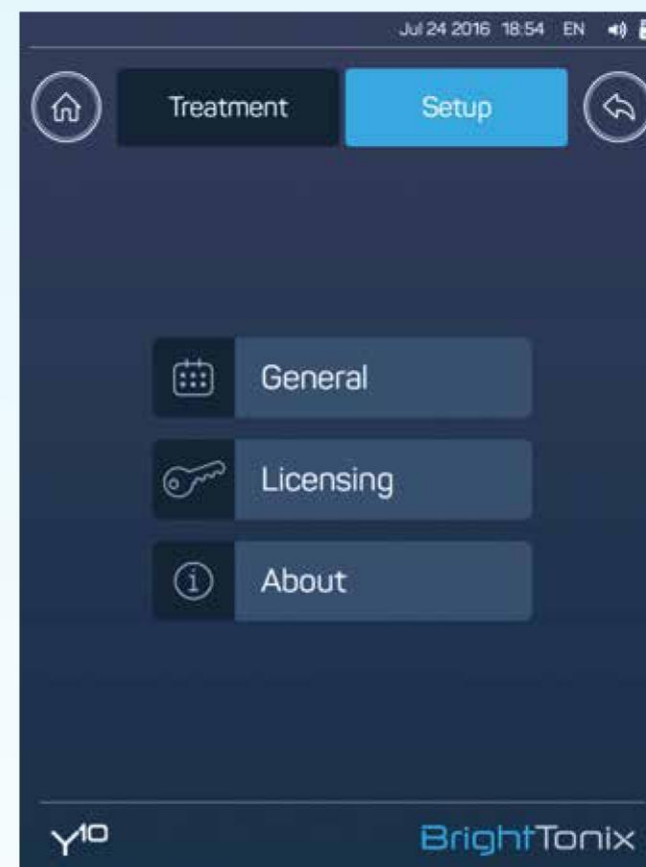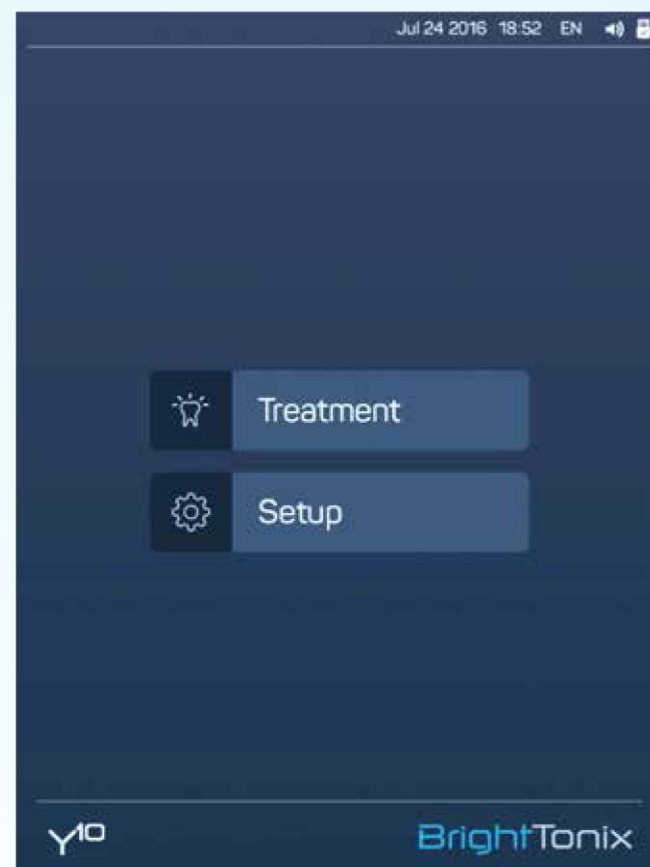


ВНИМАНИЕ: Чтобы просмотреть экранную версию руководства для оператора, нажмите кнопку «Руководство оператора».

Шаг 5 - Навигация экрана



Нажмите кнопку в любое время, чтобы перейти к экрану главного меню.

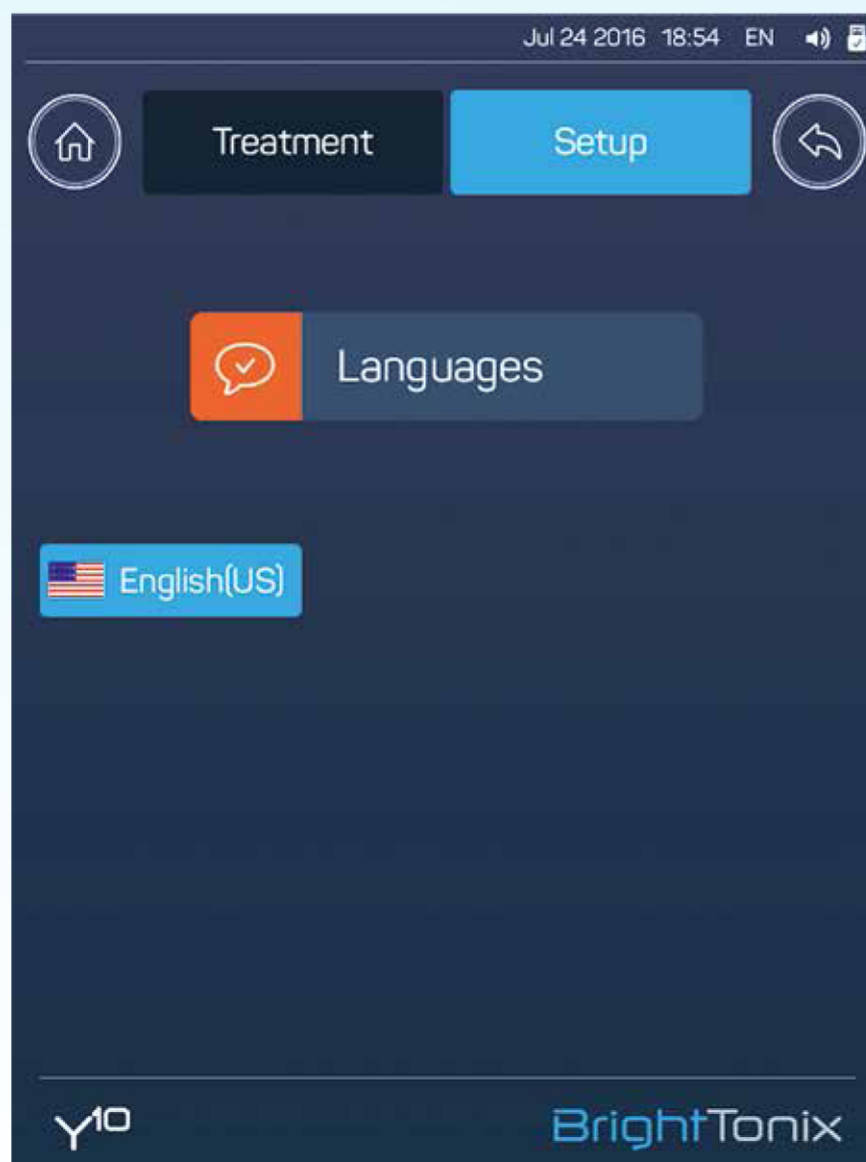


Нажмите кнопку «Возврат» в любое время, чтобы перейти к предыдущему экрану.

Шаг 6 - Подготовка капы



Подсоедините новую одноразовую капу к аппликатору, вставив язычок в капе в прорезь на верхней части аппликатора. Убедитесь, что капа подсоединена к дистальному концу кабеля.

ВНИМАНИЕ: Перед подключением капы убедитесь, что из него не торчат электроды. Капа не подлежит стерилизации, только для одноразового использования.

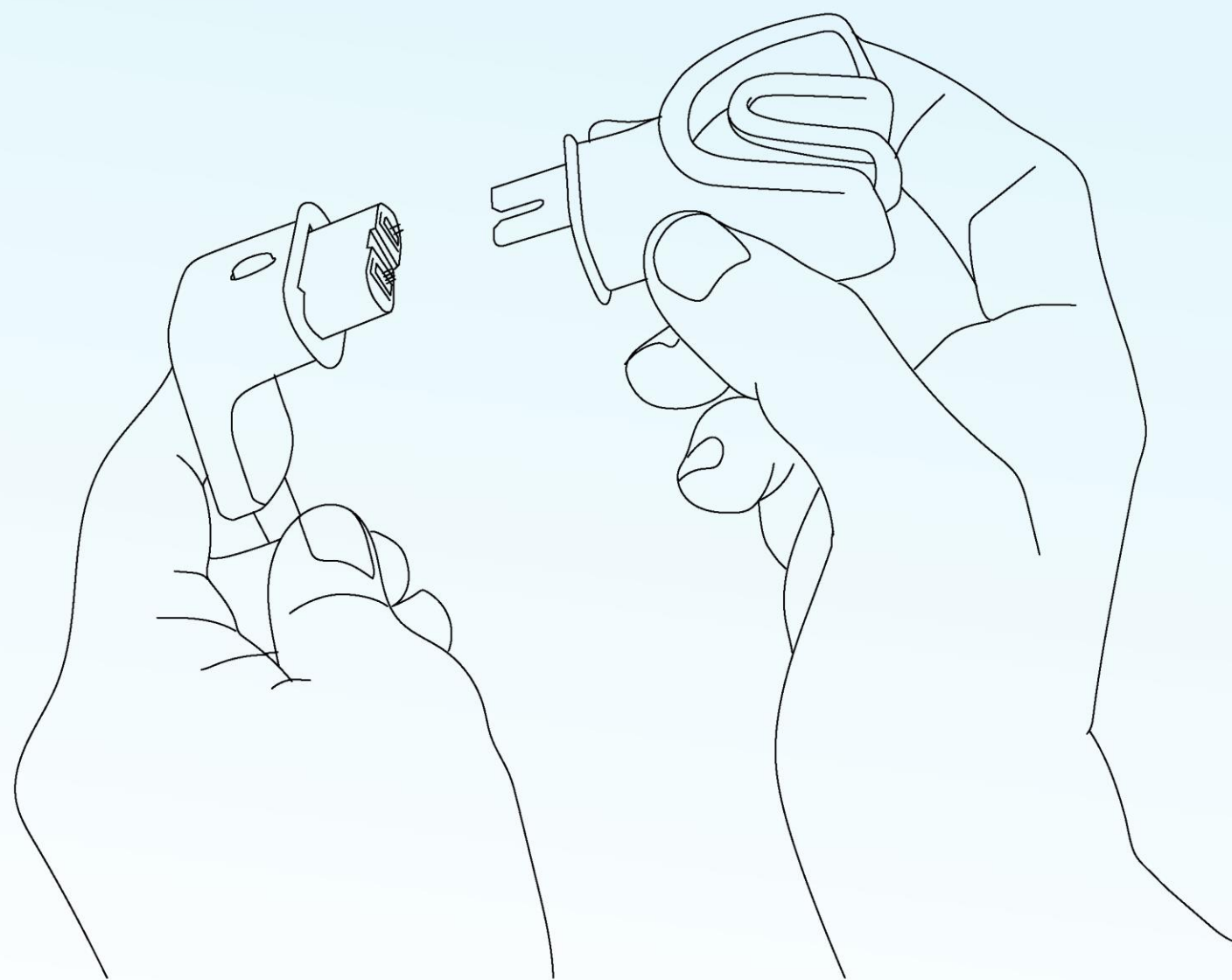



Шаг 7 - Настройка лечения

Нажмите кнопку «Лечение» на экране, чтобы настроить системные операции. Появится основной экран лечения.

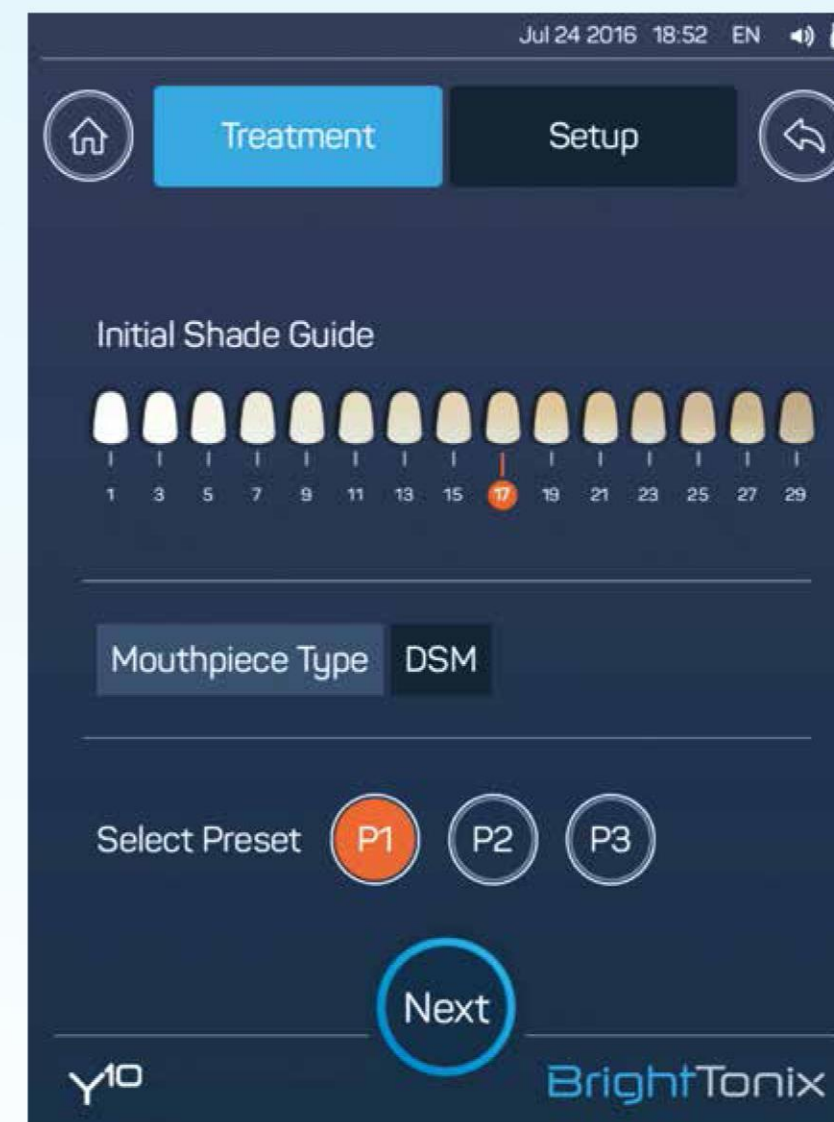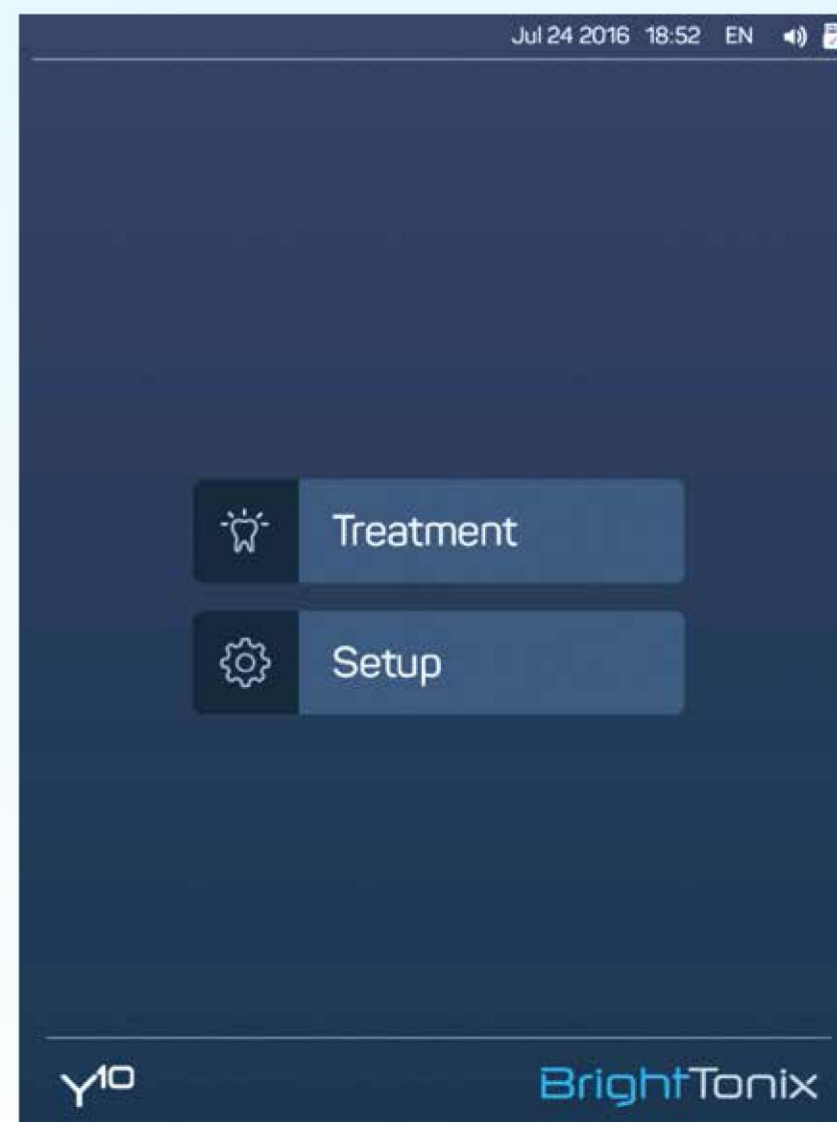

Шаг 8 - Выбор тона

Выберите текущий тон зубов клиента и коснитесь соответствующего номера оттенка, чтобы выбрать его.

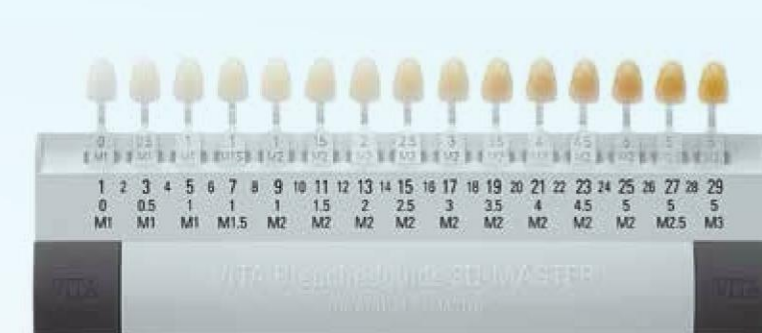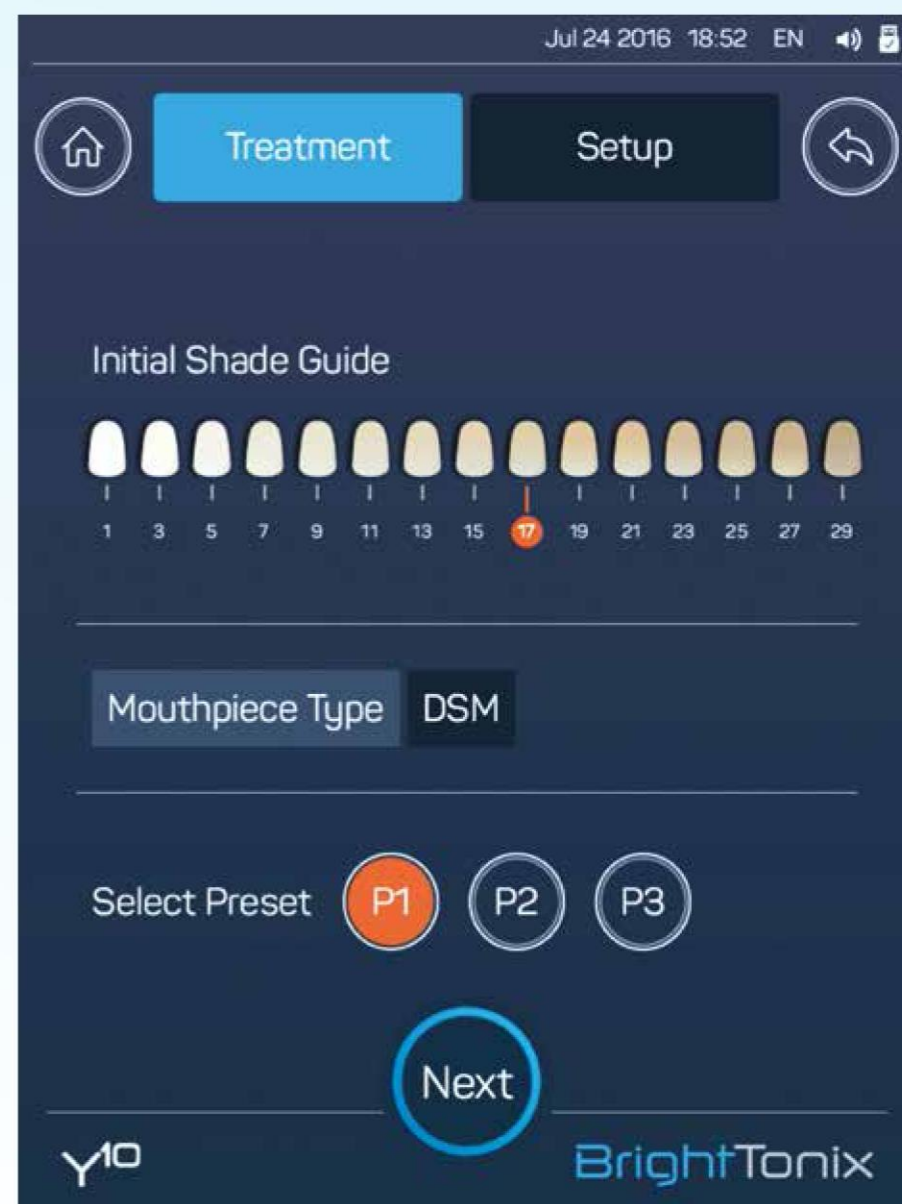


VITA 3D-MASTER гид по отбеливанию

ВНИМАНИЕ: Держите гид по отбеливанию примерно на расстоянии 10-50 см от открытого рта клиента, чтобы определить тон.

Шаг 9 - Выбор предварительной настройки

Выберите предварительную настройку для лечения:

- P1** Маломощное лечение, продолжительность 15 минут (автоматически выбирается по умолчанию).
- P2** Среднемощное лечение, продолжительность 20 минут.
- P3** Высокомощное лечение, продолжительность 30 минут.

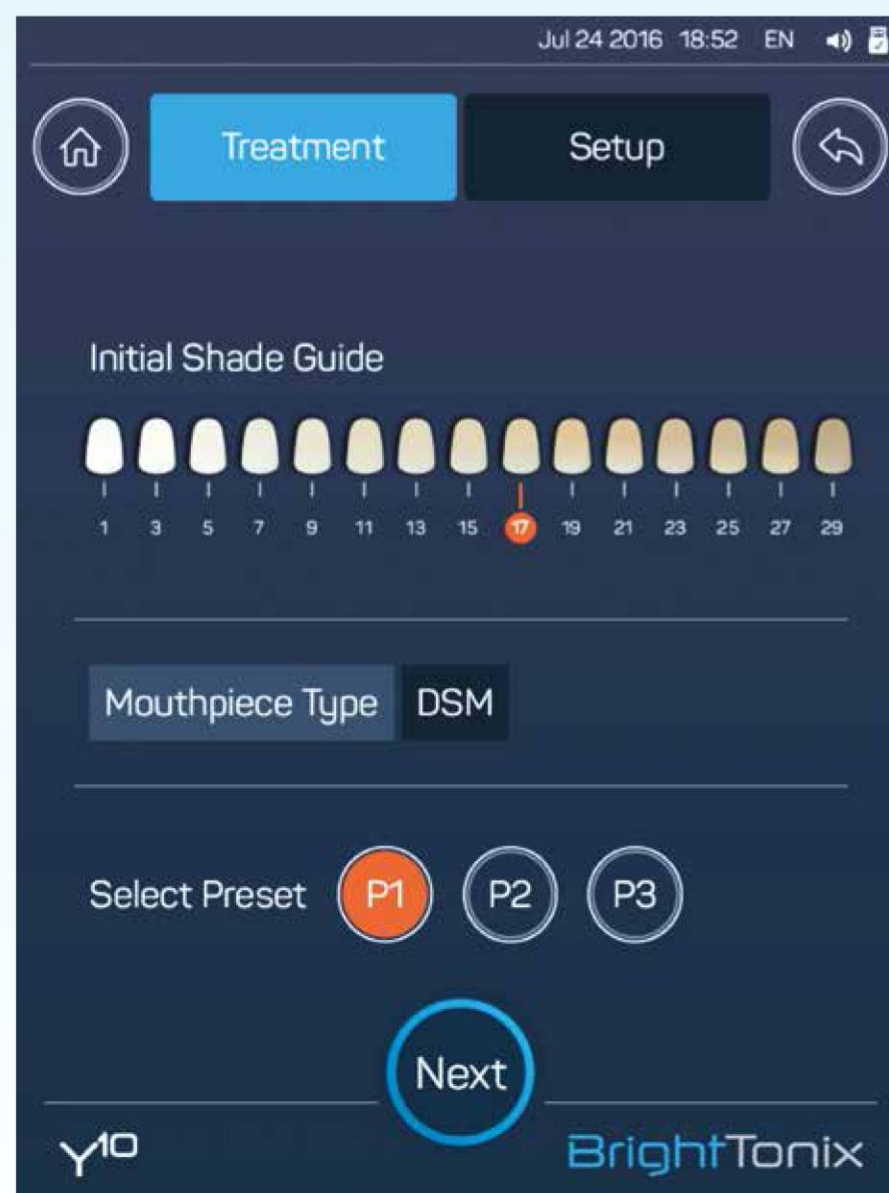

Шаг 10 - Применение зубной пасты

А - Обильно нанесите зубную пасту Y10 на нижнюю сторону капы.

В - При размещении капы во рту пациента, нанесите зубную пасту на верхнюю часть капы.


С-Убедитесь, что капа закреплена в полости рта пациента.



А - нанесение на нижнюю часть





В - нанесение на верхнюю часть

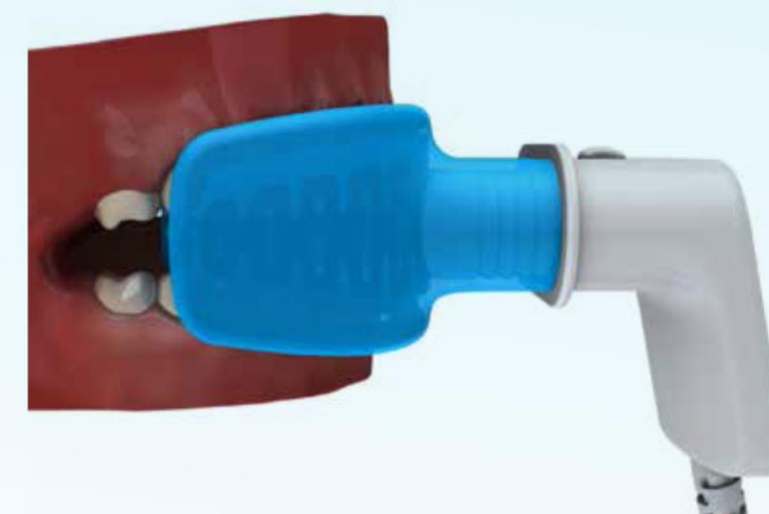

С - закрепление капы



Шаг 11 - Подготовка

Нажмите кнопку «Далее», появится экран «Лечение».

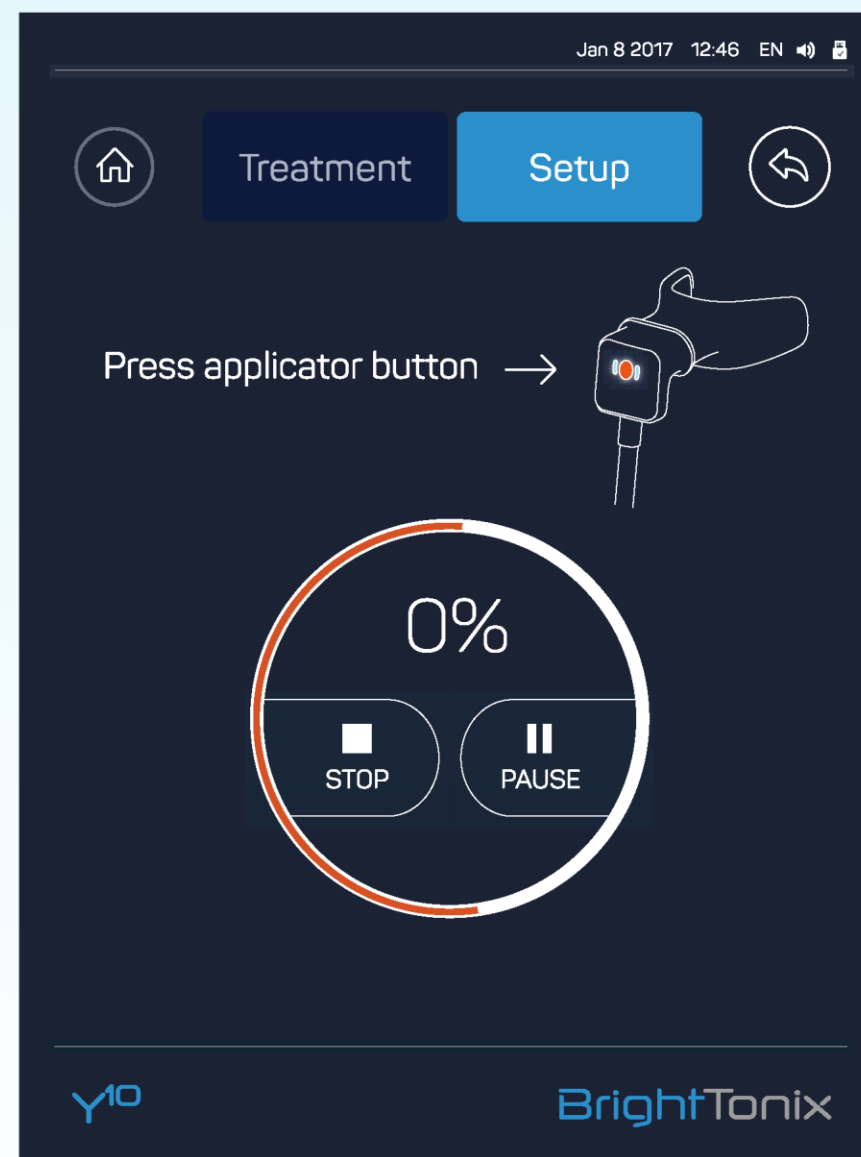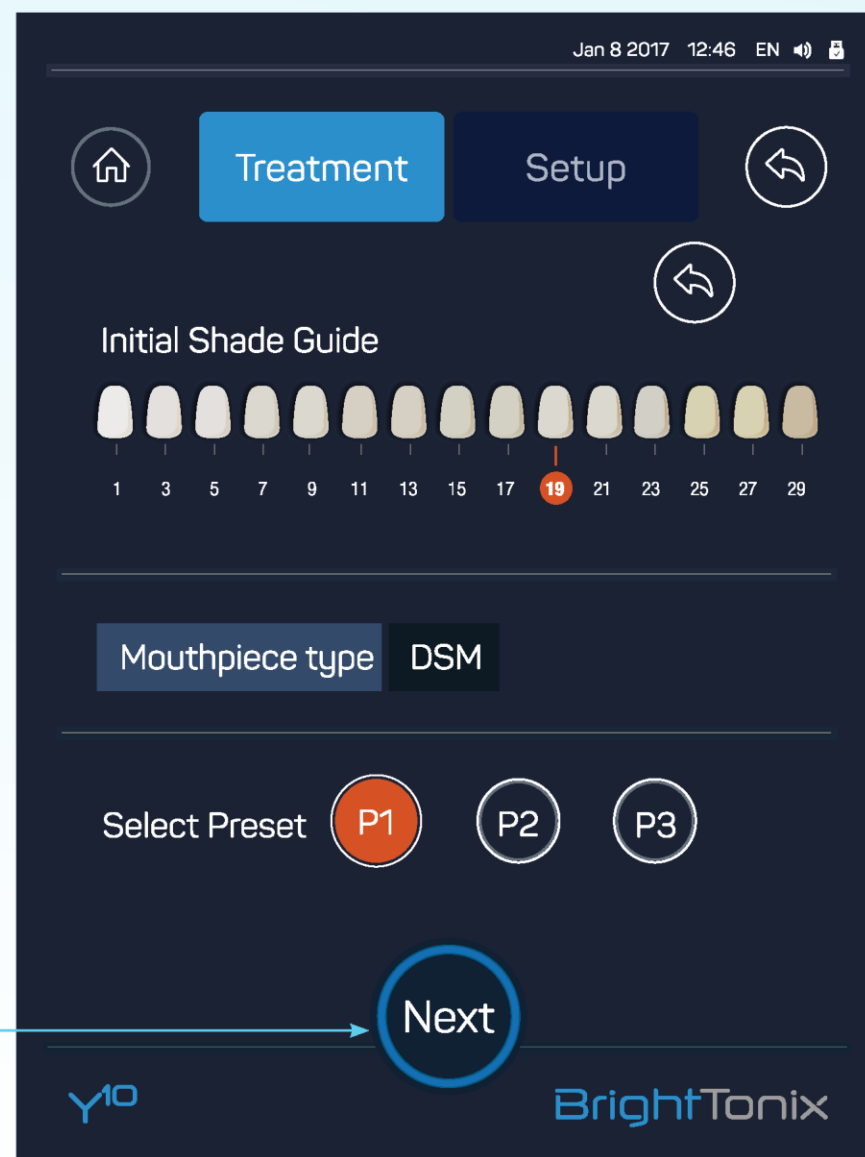

Шаг 12 - Выполнение лечения

Нажмите кнопку аппликатора, чтобы начать лечение, процентный индикатор прогресса будет отсчитываться от нуля до 100%, чтобы показать ход лечения.

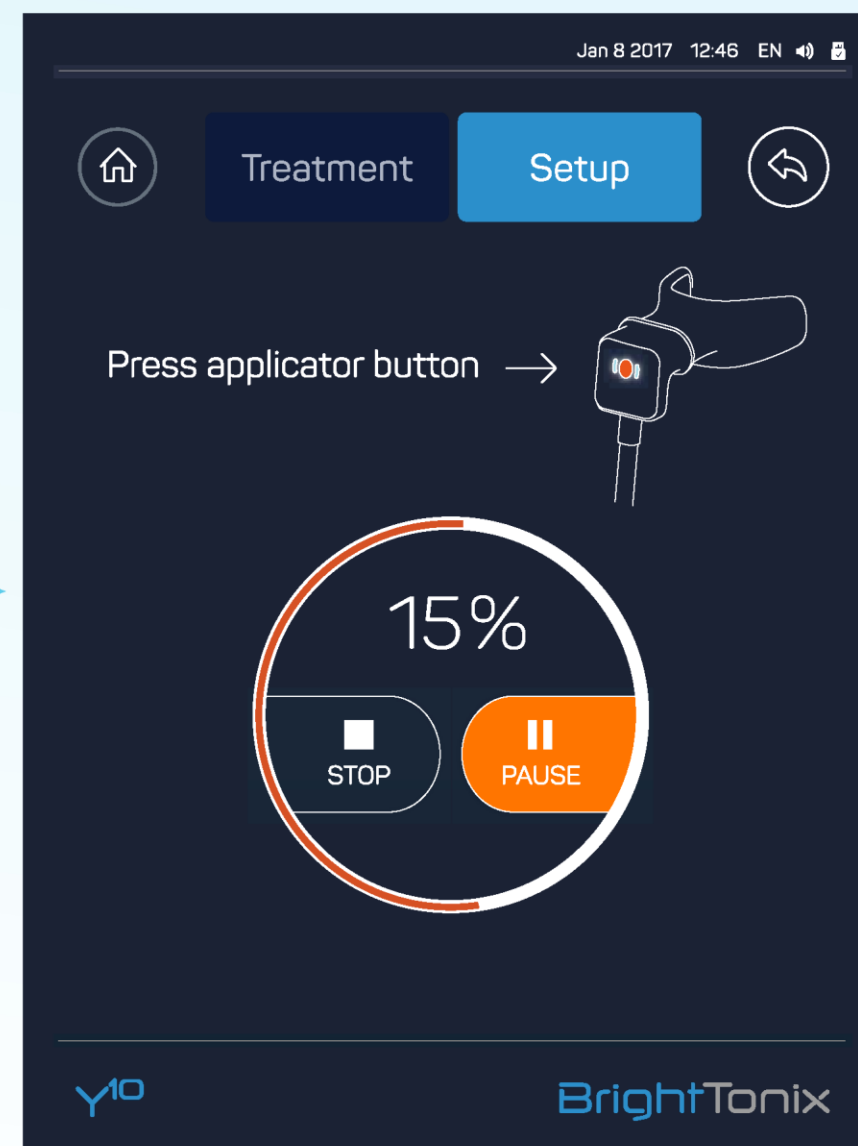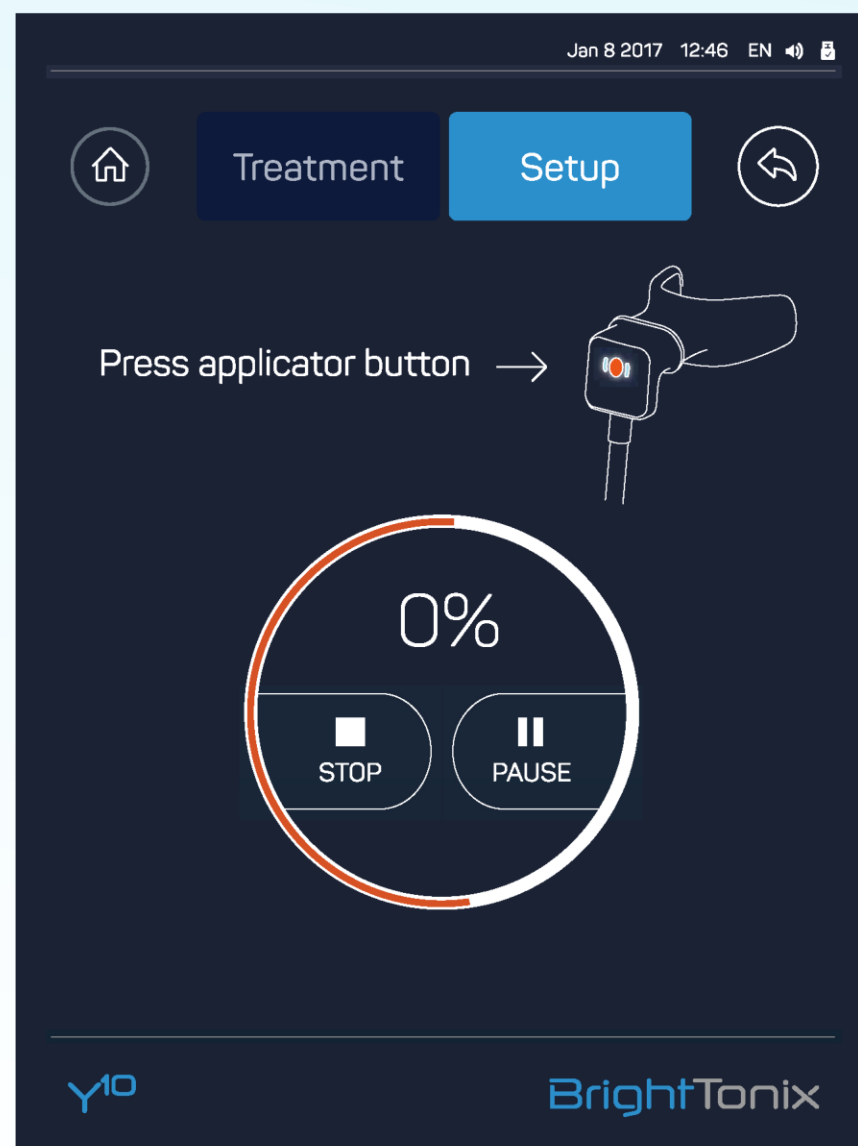

ВНИМАНИЕ: Если клиент сообщает о дискомфорте, в любое время вы можете нажать кнопку «Пауза», чтобы прервать лечение. Для продолжения нажмите «Возобновить». Нажатие кнопки «Стоп» полностью прекратит лечение без возможности возобновить его.

Шаг 13 - Окончание лечения

После того, как процентное число достигнет 100%, погаснет подсветка, и отобразится экран.


Нажмите кнопку в верхней части капы, чтобы безопасно удалить аппликатор из капы.

Удалите капу изо рта пациента и дайте ему прополоскать рот водой.




Шаг 14 - Выбор окончательного тона

Выберите окончательный тон, достигнутый в конце лечения, и нажмите кнопку, чтобы сбросить систему для следующего клиента.

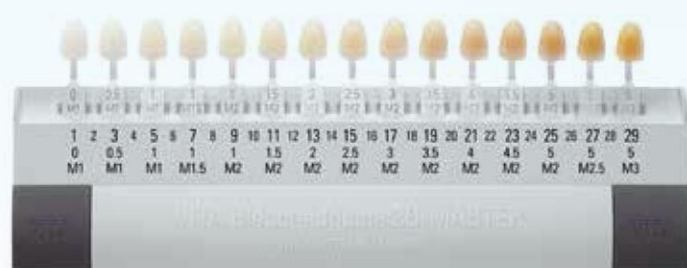

VITA 3D-MASTER гид по отбеливанию

ВНИМАНИЕ: Держите гид по отбеливанию примерно на расстоянии 10-50 см от открытого рта клиента, чтобы определить тон.

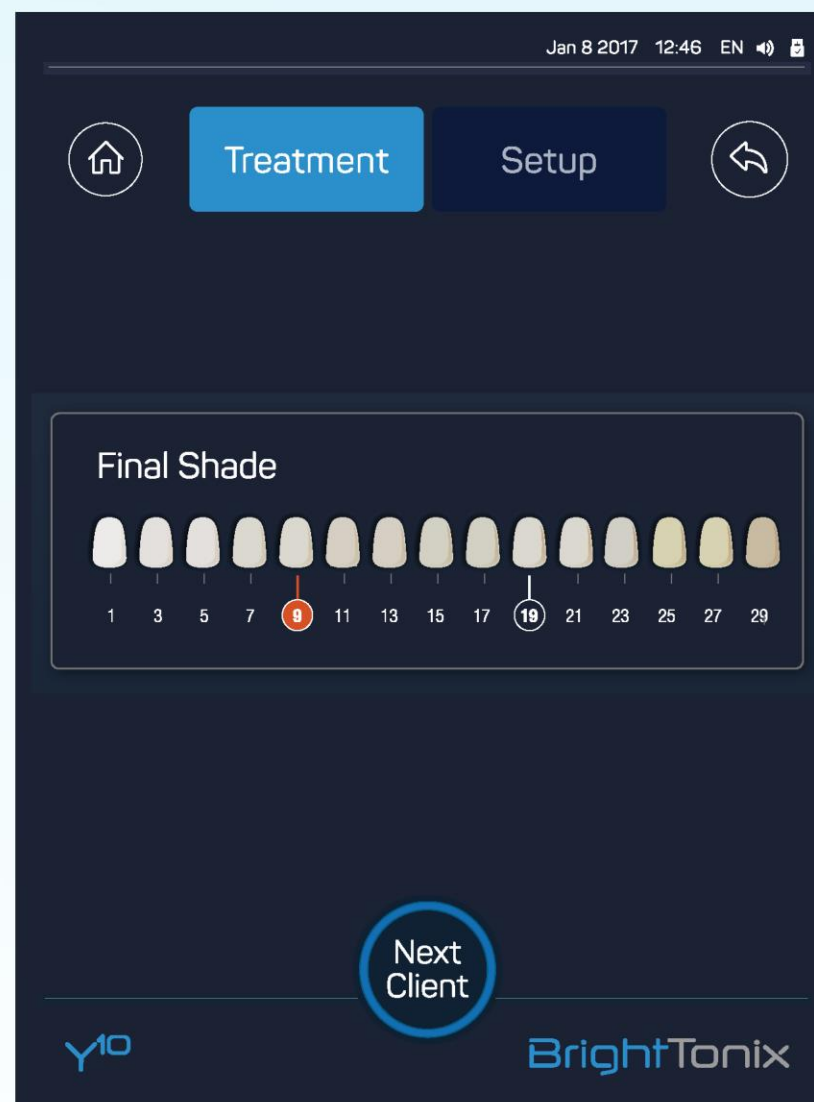

ВНИМАНИЕ: При бездействии системы более 5 (пяти) минут, система переключается в режим ожидания.

BrightTonix

Спасибо! 10