



**Инструкция  
по замене графитовых щеток  
в двигателе НВХ-Д (НWX-D)  
для  
УПЗ 5.0 АРТ, УПЗ 7.2 КОМБИ,  
ВМУ 3.2 БАЗИС, ВМУ 2.0 МАСТЕР НЬЮ,  
СЗТ 3.0 ДРИМ/ДРИМ ЭКО,  
ВМУ 1.0 КОМПЛИТ**

**АВЕ 592.100.000 И2**

## Замена изношенных щеток в двигателе НВХ-Д (НВХ-D) обязательно производится парно

1. Извлечь двигатель из корпуса изделия, рис.1
2. С помощью инструмента (отвертки или др.) отсоединить обойму щетки от провода, рис.2.
3. Нажать отверткой на язычок защелки и извлечь щетку из держателя, рис.3.



Рис.1



Рис.2



Рис.3

4. Обязательно произвести чистку коллектора двигателя от продукта износа щеток, рис.4.
5. Сборку производить в обратном порядке: установить в держатель новую щетку, надавить до характерного щелчка, рис.5.
6. Инструментом обжать провод в обойме щетки, добиться надежного контакта, рис.6.
7. Установить двигатель в изделие и проверить работоспособность.



Рис.4



Рис.5



Рис.6

