




EAC



СВЕТИЛЬНИК серии ЛЮКС

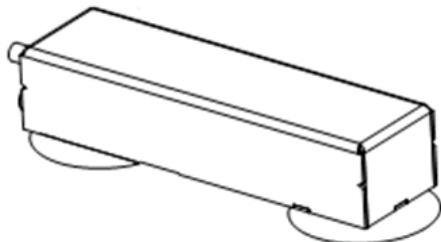

**Этикетка
АВЕ 631.000.000 ЭТ**

Сертификат соответствия
№TC RU C-RU.A116.B.06987 от 29.09.2015

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

серии ЛЮКС	5.0 ЩИТ
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

feedback@averon.ru

19-01

www.averon.ru

<https://stomshop.pro>

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника серии ЛЮКС (далее – ЛЮКС), ТУ 3461-050-52331864-2015, ТН ВЭД 9405 40 990 8.

1.2 ЛЮКС предназначен для совместного использования с боксами Б 6.0/6.0 БИГ, Б 7.х МОБИЛ АРТ, шлифмотором ПОЛИР МАСТЕР, модулем вытяжным универсальным ВМУ х.х. Легко устанавливается и снимается без дополнительных доработок или креплений.

1.3 Светодиодная лампа защищена от загрязнения и механических повреждений отходами, располагается вплотную к экрану, не дает бликов.

1.4 Условия эксплуатации

- окружающая температура10...35°С
- влажность при 25°С, не более80%

1.5 Основные технические характеристики

- электропитание ~220/230В 50/60Гц 0,1А
- мощность 6 ВА
- светодиодная лампа FERON G4 5W 4000K
- габариты, не более 105×35×25 мм
- масса, не более 0,2 кг

1.6 Комплектность

Светильник с лампой

Этикетка АВЕ 631.000.000 ЭТ

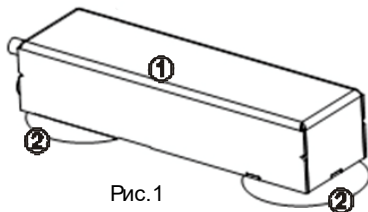


Рис.1

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Предварительно увлажнив поверхность присосок (2), разместить светильник (1) в нужном месте на наружной поверхности защитного экрана и прижать для фиксации.

Вставить вилку сетевого шнура ЛЮКС в розетку ~220/230В 50/60Гц.

Включение/выключение освещения – переключателем на сетевом шнуре.

После работы выключить переключатель и отключить ЛЮКС от сети.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для замены лампы выкрутить винты, расположенные в торце ЛЮКС и фиксирующие скобу с патроном к корпусу. Новую лампу вкрутить в патрон, завести лампой под фланец с присоской и прикрутить скобу винтами к корпусу.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца (на лампу – 6 месяцев) с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы – не менее 5 лет.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.