



**Инструкция по замене
сменных конусных
наконечников
для установки на шлифмоторы
серии ПОЛИР 6.х
АВЕ 085.050.000 И2**

Мобильное Приложение АВЕРОН:


для Android



для IOS



для Huawei

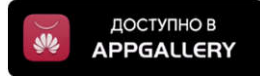

НАБОР 6.5 ПОЛИР - набор из двух сменных конусных наконечников (левый и правый) для установки на шлифмоторы серии ПОЛИР 6.х. Предназначен для самостоятельной замены потребителем изношенных конусных наконечников.

Замену наконечников проводить при вынутой вилке ПОЛИР 6.х из розетки сети.

1. Выкрутить стопорный винт крепления наконечника на валу электродвигателя.
2. При помощи отвертки с плоским жалом снять наконечник с вала электродвигателя.
3. Надеть новый наконечник (поставка по дополнительной заявке).
4. Закрутить стопорный винт.

Наконечники различаются на левый и правый. Левый наконечник имеет дополнительную риску, см. рис.

