



ДОЛОТО ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПАКОВОЧНОЕ ПД 1.0 МАГНИТ



Этикетка
АВЕ 435.001.000 ЭТ

ВНИМАНИЕ!

Перед подсоединением **долота** после хранения разместить его вверх отверстием для насадки и капнуть 5...7 капель смазки (см. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ), затем энергично встряхнуть 10 раз до появления звука перемещения ударника.

ВНИМАНИЕ!

В качестве штуцеров применены быстроразъемные соединения.

См. Памятку **Эксплуатация быстроразъемного соединения.**

С целью снижения отказов перед подсоединением **долота** продуть пневмотрубку сжатым воздухом для удаления из нее пыли и микрочастиц абразива.

Если после подсоединения и подачи воздуха насадка **долота** неподвижна (поршень в нейтральной фазе) - сместить насадку по продольной оси.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Долото пневматическое распаковочное **ПД 1.0 МАГНИТ** (далее – **долото**) предназначено для распаковки литейных опок. Является принадлежностью к Аппаратам для струйной обработки АСОЗ "Аверон" (далее – АСОЗ).

1.2 Особенности

- мощный инструмент, обеспечивающий бережную и одновременно быструю распаковку опоки;
- магнитная фиксация на рабочем месте;
- выполнено из высококачественной стали.

Примеры использования:

- в составе АСОЗ 1.1 АРТ КАСТ: **долото** подключается к пневмораспределителю АСОЗ и включается общей педалью;
- с элементами системы АСОЗ ПЛЮС: БОКС 1.0 АСОЗ + МС 3.0 АСОЗ + РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 1.0 АСОЗ +ПВП 1.0 + ПД 1.0 МАГНИТ;
- со сторонним вентилем - на выбор Потребителя.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура..... 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- рабочее давление6 атм
- расход воздуха, не более 50 л/мин
- габариты..... 25×30×160 мм
- масса, не более..... 0,4 кг

1.5 Комплектность

	шт
Пневмодолото	1
Фитинг цанга прямой.....	1
Пневмотрубка полиуретановая L=1 м	1

Этикетка АВЕ 435.001.000 ЭТ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


При подсоединении **долота** отключите АСОЗ от сети и перекройте магистраль высокого давления.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ работать в защитных очках и маске или использовать бокс, например, Б 7.х МОБИЛ АРТ, Б 1.0 АСОЗ.

Не оставляйте долото в камере АСОЗ при струйной обработке во избежание попадания в него песка и выхода из строя.

3 УСТРОЙСТВО и ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1 – Пневмодолото
- 2 – Насадка
- 3 – Пневмотрубка
- 4 – Фитинг цанга прямой

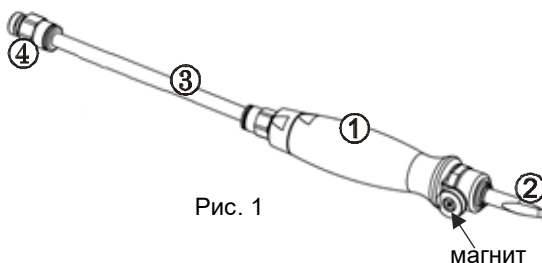

При снижении рабочего давления ниже 6 атм резко падает сила удара насадки долота.



Пример с АСОЗ АРТ КАСТ: подключите **долото** к штуцеру пневмораспределителя.

Установка насадки в **долото** возможна только в двух диаметральных положениях (на его хвостовике две лыски). Полная установка насадки в **долото** сопровождается небольшим щелчком фиксатора.

Легкое прижатие рабочей части насадки к модели обеспечивает ее больший ход, ускоряя разрушение гипса, паковочной массы.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **регулярно** смазывайте **долото** 3...5 каплями смазки (дизельное топливо, очищенное машинное масло);
- если **долото** не использовалось более 10 дней, то разместите его вверх отверстием для насадки и капнуть 5...7 капель смазки, затем энергично встряхните 10 раз до появления звука перемещения ударника;
- производите заточку насадки по мере необходимости.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Средний срок службы - 5 лет.

Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Гарантии не распространяются на насадку, пневмотрубку.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ПД 1.0 МАГНИТ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.