




ЕАЭС



СТОЛ ПОДКАТНОЙ ПРИБОРНЫЙ

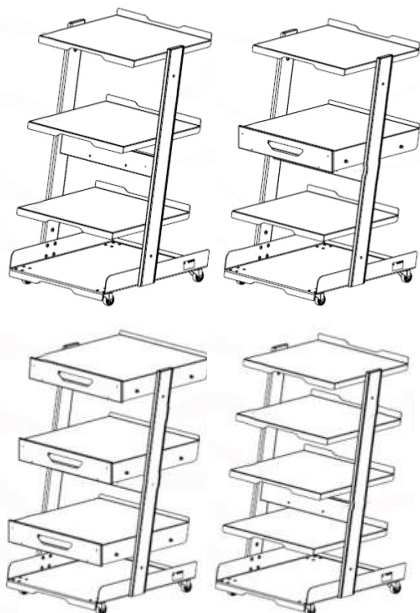

СПП 1.0 М

СПП 1.1 М

СПП 1.3 М

СПП 1.4 М

Этикетка
АВЕ 020.000.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.25587/20 от
29.04.2020


ПРАЙС АВЕРОН всегда под рукой на мобильном



Приложение ПРАЙС АВЕРОН
для Android на



<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.averon.averonpricexml1>

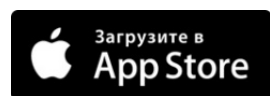

Приложение ПРАЙС АВЕРОН
для IOS (iPhone и iPad) на




<https://apps.apple.com/ru/app/прайс-аверон/id1484614177>


Столик подкатной приборный СПП 1.x (далее – **СПП**) - предназначен для компактного размещения оборудования и инструментов, а также их оперативного перемещения без переноски. ТО 31.09.11-39-52331864-2020.

Комплектность		шт			шт
основание	—	1	перекладина	—	1
стойка боковая лев/прав. —	1/1		планка декор. лев/прав.....	—	1/1

для СПП 1.0 М	для СПП 1.1 М	для СПП 1.3 М	для СПП 1.4 М
полка — 3 шт	полка — 2 шт	выдвижной ящик — 3 шт	полка — 4 шт
	выдвижной ящик — 1 шт		

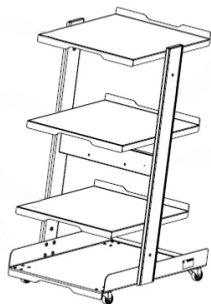


СПП 1.0 М

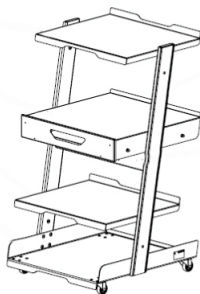

СПП 1.1 М



СПП 1.3 М

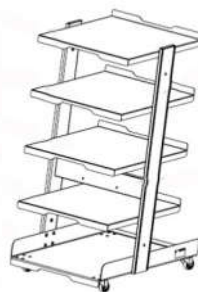

СПП 1.4 М

☒ - **Поставка по дополнительной заявке:**

ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 - сетевой фильтр на 5 розеток с заземлением и магнитной фиксацией в удобном для работы месте (общий выключатель с индикацией, защита от превышения нагрузки, фильтр помех, максимальный ток 10 А).

КРЮЧОК 3.0 - планка с тремя крючками для встраивания в столы и другие изделия АБЕРОН.

Особенности

Большая система хранения.

Легко перемещается благодаря поворотным колесным опорам.

Возможно размещение под ПОЛКОЙ 1.1 БРИДЖ при соединении двух столов.

Полки и ящики можно устанавливать в произвольной последовательности.

Соответственно легко создавать требуемую комбинацию полок и ящиков.

Полки без боковых бортиков. Возможна установка в перевернутом виде, если есть необходимость в боковых бортиках.

Основание можно использовать в качестве дополнительной полки.

Основные технические характеристики

Габариты, не более 400×430/470×720 мм

масса, не более 15 кг

максимальная нагрузка на полку 10 кг

ПОРЯДОК СБОРКИ

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).

Отсоединить декоративные планки от боковых стоек (3).

Установить и закрепить:



— боковые стойки (3) к основанию (1) с опорами (2);

— перекладину (4);

— полки (короб с выдвижным ящиком для СПП 1.1, СПП 1.3) последовательно снизу вверх.


Установить в боковых стойках (3) декоративные планки.

СПП готов к работе.

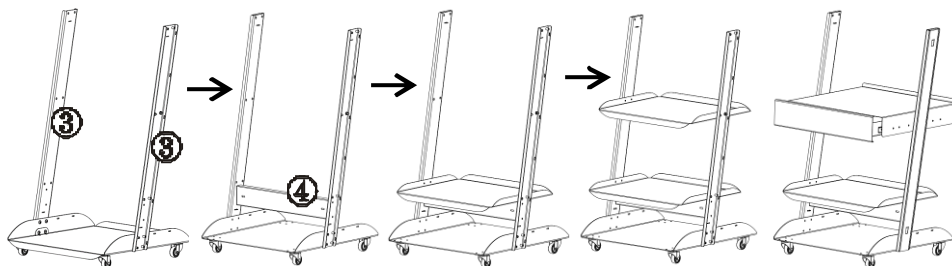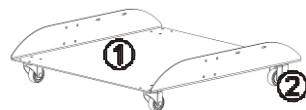

Пример установки ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0, магнитная фиксация:

ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 с магнитной фиксацией легко снимается для подключения нового прибора и устанавливается в любое место столика: в предназначенное специальное место, на перекладину, под любую полку, на боковую стойку.

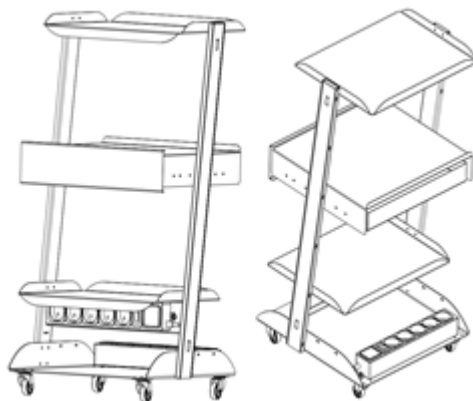

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

<https://stomshop.pro>

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО»
бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20
тел. (343) 311-11-21
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ







Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

СПП 1.0 М		Зав. номер
СПП 1.1 М		Зав. номер
СПП 1.3 М		Зав. номер
СПП 1.4 М		Зав. номер
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»		
Дата выпуска _____	Упаковщик	_____
Дата продажи _____	Продавец	_____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

КОНТАКТЫ АВЕРОН

	averon.ru		Averon Russia
	8 800 700-12-20 бесплатный по РФ		АВЕРОН - оборудование для зубных техников
	feedback@averon.ru		instagram.com/ averon.ru

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!

<https://stomshop.pro>