



СТОЛИК ПОДКАТНОЙ ПРИБОРНОЙ

модель СПП 1.4



Этикетка
АВЕ 586.000.000 ЭТ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы – 5 лет.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель СПП 1.4	Зав. номер
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Столик подкатной приборный СПП 1.4 (далее – **СПП**) - предназначен для компактного размещения оборудования и инструментов. ТО 5621-39-52331864-2015.

Условия эксплуатации

окружающая температура..... 10...35 °С
 влажность при 25 °С, не более 80 %

Основные технические характеристики

максимальная нагрузка на одну полку 10 кг
 масса, не более 10 кг
 габариты 400×420×720 мм

Комплектация	ШТ		ШТ
основание	— 1	винт М 4×12 п/ш	— 29
полка	— 4	гайка М4.....	— 29
стойка боковая лев/прав	— 1/1	шайба 4.....	— 29
комплект колесных опор	— 1 к-т	шайба гр.4	— 29
панель декоративная лев/прав....	— 1/1	шайба 5	— 4
перекладина	— 1	шайба гр.5	— 4
		гайка М5 колп	— 4

ПОРЯДОК СБОРКИ (рис.1-7)

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шурупверт, электроотвертка).

Установить и закрепить опоры **(2)** на основании **(1)** с помощью шайб 5, шайб гр.5 и гаек М5.

УСТАНОВИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ винтами, гайками, шайбами и шайбами гровера из комплекта:

- боковые стойки **(3)**;
- перекладину **(4)**;
- полки последовательно снизу вверх.

Установить в боковых стойках **(3)** декоративные панели, подогнуть их язычки, рис.7.

Столик подкатной приборный готов к работе.

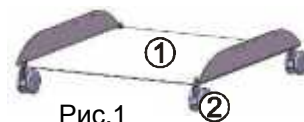


Рис.1

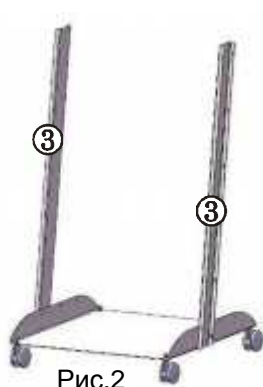


Рис.2

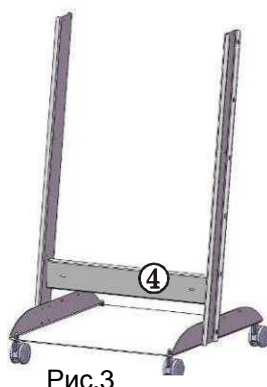


Рис.3

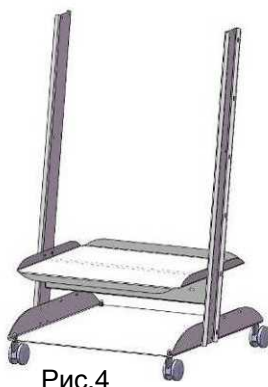


Рис.4



Рис.5

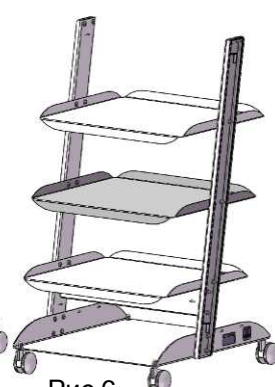


Рис.6

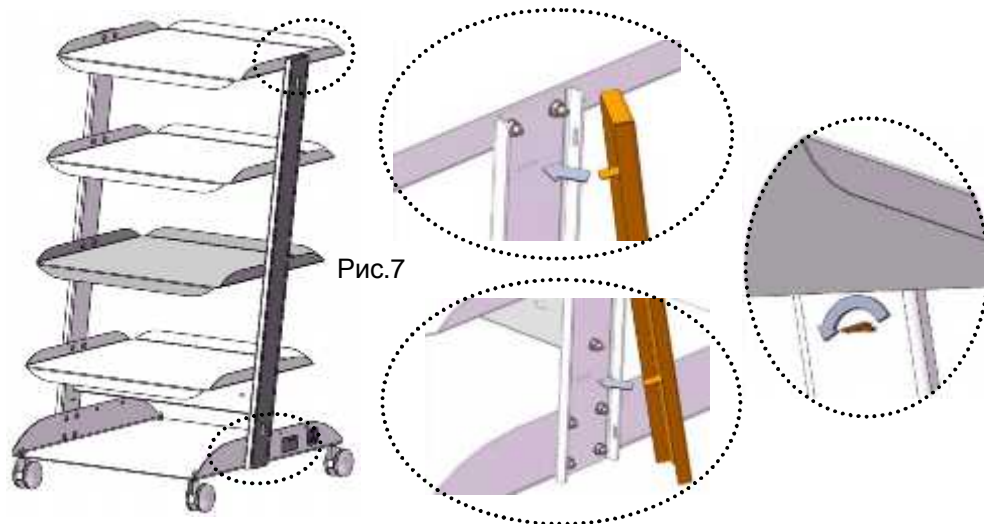


Рис.7