



## СТРУБЦИНА 2.0

Этикетка  
АВЕ 674.000.000 ЭТ



**ПРАЙС АВЕРОН** всегда под рукой на мобильном



Приложение ПРАЙС АВЕРОН  
для Android на



<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.averon.averonpricxm1>



Приложение ПРАЙС АВЕРОН  
для IOS (iPhone и iPad) на



<https://apps.apple.com/ru/app/прайс-аверон/id1484614177>

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

19-02

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

<https://stomshop.pro>

# 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 СТРУБЦИНА 2.0** (далее – струбцина) предназначена для крепления светильников ЛЮКС АВЕРОН.

## 1.2 Особенности

Дополнительно предоставляет систему хранения: держатель до 3-х инструментов, полочка, ГНЕЗДО 6.0 для навешивания ДЕРЖАТЕЛЕЙ КОРЗИНА и СТАКАН, ПОДСТАВОК с шагом между пазами 60 мм, магниты для фиксации различных инструментов.

## 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

## 1.4 Основные технические характеристики

- крепление к столешнице толщиной ..... до 40 мм
- габариты струбцины ..... 110x170x225 мм
- масса струбцины, не более ..... 1,5 кг
- габариты гнезда ..... 120x40x65 мм
- масса гнезда, не более..... 0,5 кг

## 1.5 Комплектность.....шт


1 – Струбцина с винтами-барашек (2) и крышкой (3) ..... - 1

4 – ГНЕЗДО 6.0 с магнитами и крышкой (5) ..... - 1

Этикетка АВЕ 674.000.000 ЭТ

☒ - Светильник ЛЮКС 2.1

☒ – поставка по дополнительной заявке

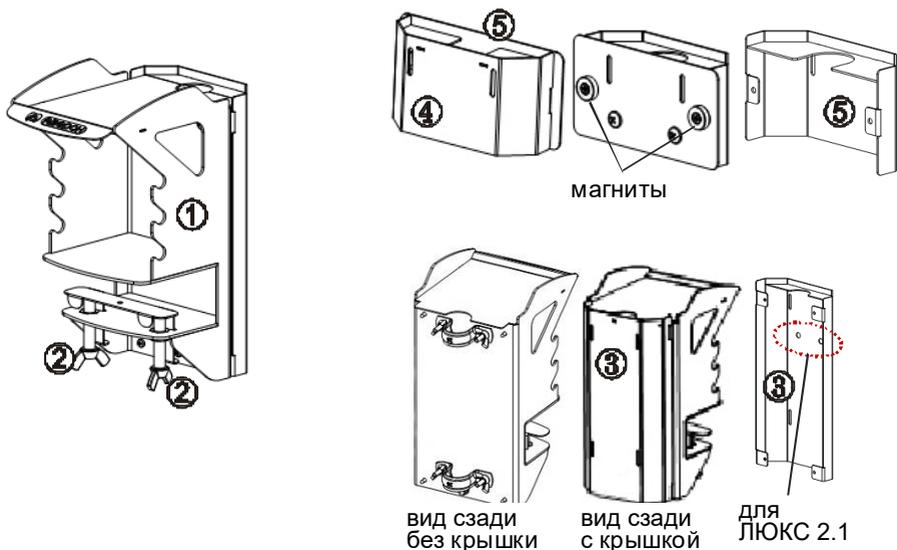

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

## 2 СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


2.1 Закрепить струбцину (1) на столешнице.

2.2 Произвести сборку светильника ЛЮКС ЛЕД ПЛЮС согласно своей эксплуатационной документации, с использованием необходимого крепежа из его комплекта.


2.3 Установить ГНЕЗДО 6.0 (4) на трубу светильника ЛЮКС АВЕРОН.

2.4 Установить ЛЮКС НЬЮ/ЛЕД АВЕРОН на струбцину, закрепив скобами его стойку-трубу. Закрыть крышкой (3).

2.5 Светильник ЛЮКС 2.1 устанавливается с использованием винтов М4х8 из его комплекта.

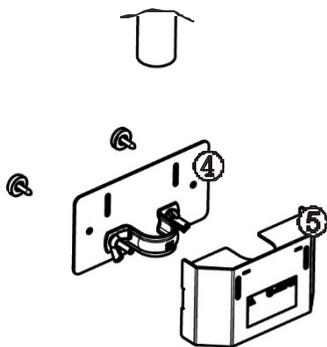

Установка гнезда

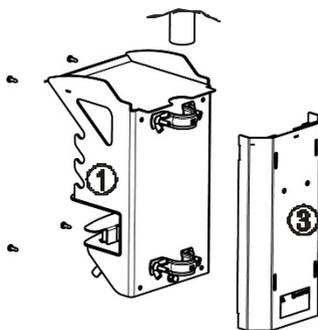

Установка светильника  
ЛЮКС АВЕРОН



## 3 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

### Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

СТРУБЦИНА 2.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## КОНТАКТЫ АВЕРОН



averon.ru



Averon Russia



8 800 700-12-20  
бесплатный по РФ



АВЕРОН -  
оборудование  
для зубных  
техников



feedback@averon.ru



instagram.com/  
averon.ru

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!