




ЕАЭС

Аверон

СТОЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА модель СЗТ 4.3 МАСТЕР

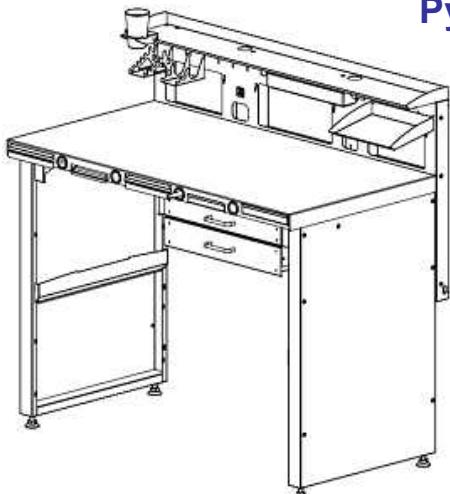

Руководство по эксплуатации
АВЕ 553.000.000 РЭ

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.ЦС01.В.01242 от 23.05.2017

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Стол зубного техника модель СЗТ 4.3 МАСТЕР (далее – **СЗТ**). ТО 5621-039-52331864-2017.

1.2 СЗТ предназначен для оснащения индивидуального рабочего места зубного техника и может использоваться в зуботехнических и литейных лабораториях.

1.3 Особенности

- полностью металлическое исполнение;
- уровни столешниц СЗТ 4.3 МАСТЕР и СЗТ 4.3 МАСТЕР МИНИ совпадают и позволяют создать единое рабочее пространство;
- устойчивое положение стола, выставляемое вращением ножек;
- многофункциональная задняя стенка с тремя карманами;
- крышка задней стенки может использоваться в двух вариантах:
 - крышка для закрывания полости задней многофункциональной стенки
 - панель для установки выше уровня верхней полки **СЗТ** и навешивания рейлингов, лотков ЛОТОК 1.0 МАСТЕР.

Также крышку можно закрепить как панель на стену.

- левое или правое размещение по выбору: вытяжного модуля, модуля с ящиками, светильника, подлокотников и фингелья, подкатной тумбы;
- упоры (подлокотники) для рук и фингелья с поддоном для сбора мусора — убираются в торец столешницы;
- два дополнительных лотка, убираются в торец столешницы;
- переставляемый съемный наклонный лоток;
- ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 сетевой фильтр на 5 розеток с магнитной фиксацией в удобном для работы месте (контакты защитного заземления, общий выключатель с индикацией, защита от превышения нагрузки, фильтр помех, максимальный ток 10 А).

1.4 По дополнительной заявке (☒) можно доукомплектовать:

- светильником ЛЮКС НЬЮ/СУПЕР/ЛЕД, ЛЮКС ЛИНЗА, ЛЮКС МАСТЕР;
- ПОЛКОЙ БРИДЖ, ПАНЕЛЬЮ БРИДЖ/БИГ для эффективного использования пространства между двумя **СЗТ**;
- подкатной тумбой ТУМБА 1.1 М;
- вытяжным модулем ВМУ БАЗИС/СТАРТ, ВМУ МАСТЕР/НЬЮ, ВМУ КОМПЛЕКТ;
- автономным фильтр-циклоном АФЦ МИНИ;
- блоком регулятора мощности БРМ 2.1 ВМУ;
- бормашиной БМ ЭКО ОПТИМУМ/ПРОФИ.

Подробная информация о дополнительных устройствах и принадлежностях – в соответствующих подразделах раздела «Столы, светильники, вытяжки» Каталога оборудования на сайте www.averon.ru.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

2.2 Основные технические характеристики

- габариты СЗТ, без подлокотников, СО, держателя стакана, не более 1155×660×1150 мм
- столешница: ширина 1150 мм
глубина 600 мм
высота над уровнем пола, не более 875 мм
- масса, общая, не более 65 кг
- максимальная нагрузка на столешницу 120 кг
- рабочее давление (обдувочное сопло) 3...6 атм

2.3 Комплектность согласно УПАКОВОЧНОМУ ЛИСТУ АВЕ 553.000.000 Д2.



аверон




научно-производственный комплекс

Учебный центр АВЕРОН

приглашает на обучение
зубных техников, врачей,
руководителей и администраторов
стоматологических учреждений



Программа на
<http://www.uc-averon.ru>

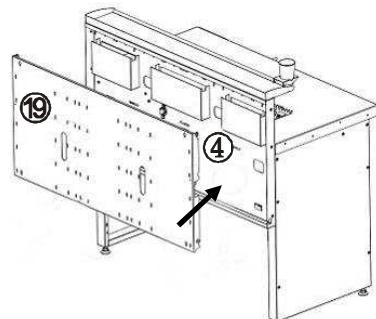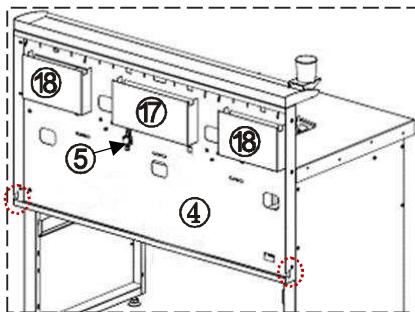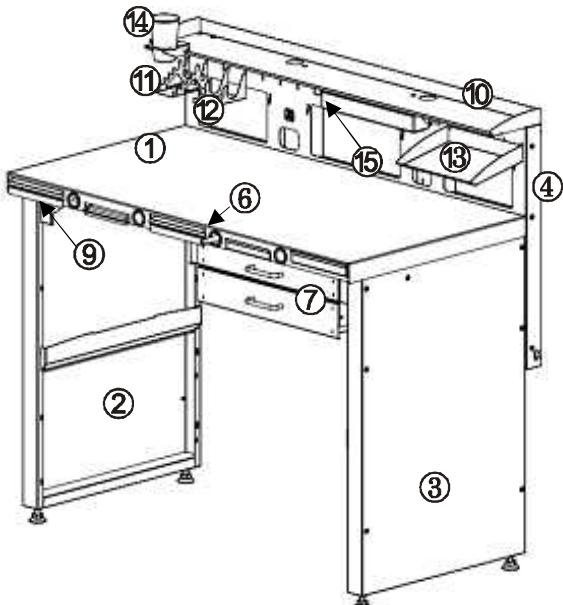


3 УСТРОЙСТВО, рис.1

- 1 – столешница с настольным покрытием
- 2 – стенка левая боковая
- 3 – стенка правая боковая
- 4 – стенка задняя многофункциональная
- 5 – пневмоблок с пневмошлангом
- 6 – сопло обдувочное
- 7 – модуль выдвижных ящиков КОМПЛЕКТ 2.0
- 8 – рама ВМУ, подробнее см. Инструкцию по сборке
- 9 – фальшь-планка
- 10 – полка верхняя
- 11 – подставка для инструментов
- 12 – подставка под пульт управления ПОДСТАВКА 2.0 МОДИС
- 13 – ЛОТОК 1.0 МАСТЕР
- 14 – стакан с кронштейном
- 15 – ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0
- 16 – навесной карман боковой стенки
- 17 – карман задней стенки большой
- 18 – карман задней стенки малый
- 19 – панель-крышка задней стенки


Подлокотники
и фингель



Перевод подлокотников и финагеля из положения хранения в рабочее:

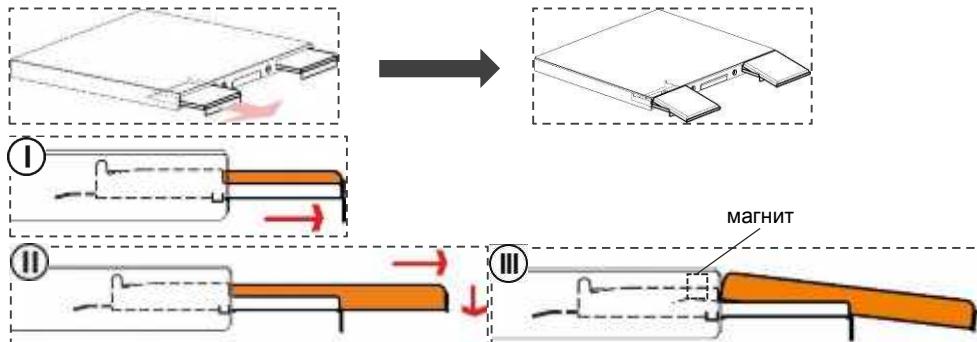


Переустановка подлокотников и финагеля:

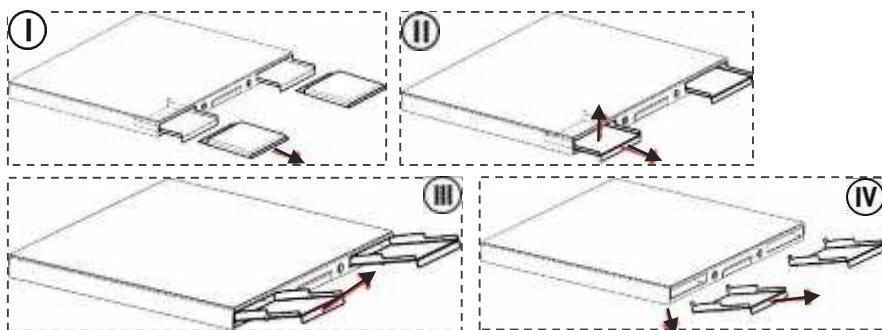

Крышка (19) устанавливается внутрь задней стенки (4) треугольником вверх (▲), удерживаясь за счет втулок.

Переверните крышку для использования ее в режиме «панель», треугольник поменяет свое расположение (▼).

Возможна установка крышки (19) выше уровня верхней полки (10) и использование ее для навешивания рейлингов, лотков и др.

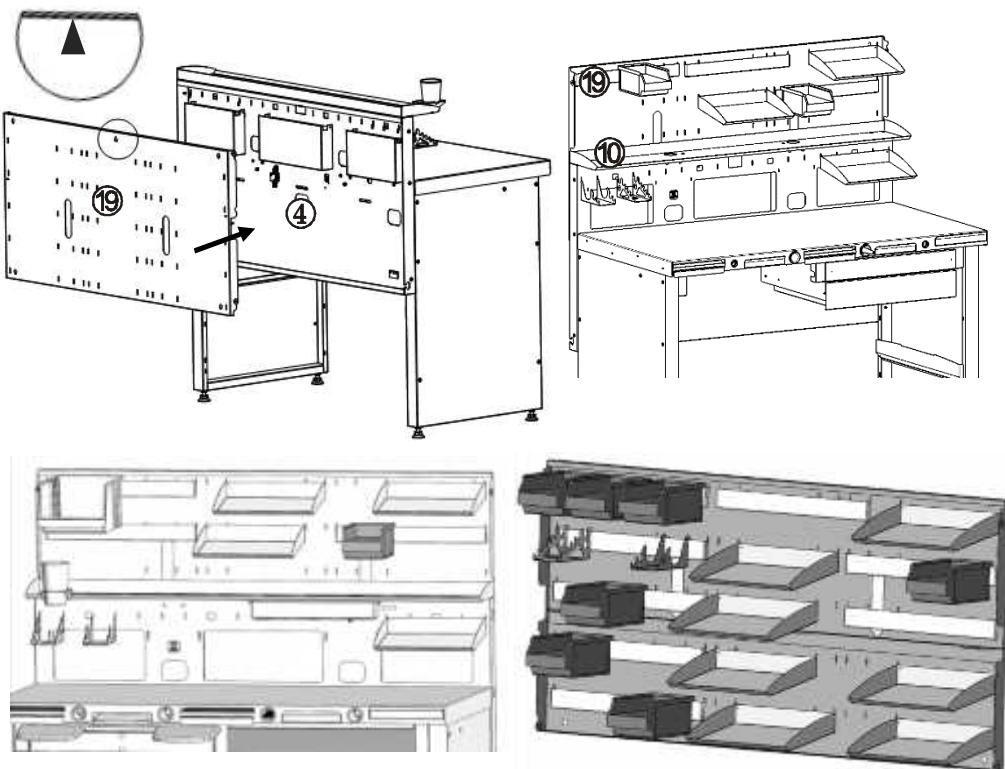


На столешнице (1) закреплено покрытие, защищающее ее поверхность от повреждений, например, абразивом при работе с бормашиной.

Пазы в торцах задней стенки (4) у нижних углов - для прокладки проводов при соединении нескольких столов.

Проволока подвязочная - для фиксации проводов и шлангов.

КРОТ 1.0 - приспособление для протягивания проводов и пневмошланга внутри столешницы.

Возможна установка второго электроблока (Э) (поставка по дополнительной заявке) под столешницей. Для удобства рекомендуется включить его в первый электроблок (15) и оставить выключатель в положении «включено» для управления от выключателя первого электроблока. В розетки второго электроблока включить оборудование длительного подключения (светильник, вытяжка, бормашина и пр.). Свободные розетки первого электроблока (15) использовать для подключения оборудования рабочей зоны или временного пользования.

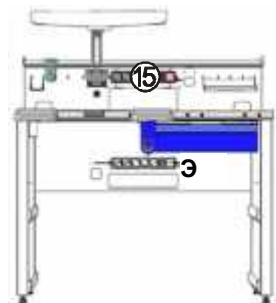

При работе с бормашиной наконечник удобно хранить с использованием фингеля, для чего необходимо перевернуть лоток отгибом вверх и снова поставить его в окно торца столешницы.



ВНИМАНИЕ!

Обесточивать ведущий ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 при подключении/отключении оборудования и по завершении работ.

Не допускать воздействия на столешницу и подлокотники абразива, режущего инструмента, а также длительного воздействия влаги.

4 ПОРЯДОК СБОРКИ

См. Инструкцию по сборке и установке АВЕ 553.000.000 ИЗ.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку поверхностей **СЗТ** проводить влажной мягкой тканью (губкой), смоченной в слабом мыльном растворе, при отключенной вилке блока электропитания от сетевой розетки.

6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

СЗТ 4.3 МАСТЕР	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. _____ (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.