

# DENTO-PREP Dental Microblaster


Пескоструйный аппарат для не прямых зубопротезных работ в зубопротезных мастерских



## Комплектация:

- 1) Пескоструйный аппарат DENTO-PREP Dental Microblaster
- 2) Шланг длиной 3 м/ 3m hose PUR

## ИНСТРУКЦИЯ

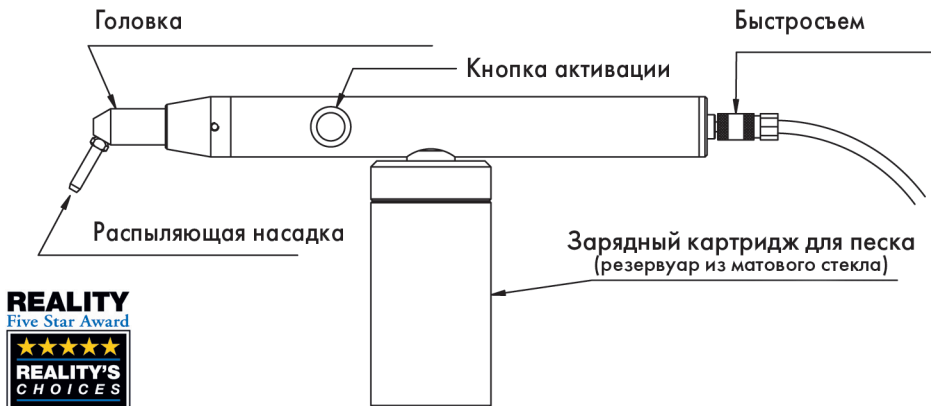

Необходимо внимательно изучить эту инструкцию перед использованием прибора

**DENTO-PREP** – компактный, автоклавируемый пескоструй для использования с такими абразивами, как оксид алюминия и оксид кремния (размер частиц 20-80 микрон). Используется для закругления поверхностей металла, керамики, пластика для лучшей связи с адгезивными агентами. DENTO-PREP изготовлен из нержавеющей стали высшей пробы (включая внутренние части и трубки) и может автоклавироваться при температуре до 135 С. Головка пескоструя поворачивается на 360 градусов и может быть установлена в любом направлении. Идеальное расположение зарядного картриджа для песка, который так же служит ручкой, позволяет с удобством пользоваться пескоструем, легко и просто направляя его на поверхность требующую обработки. Шланг подключается к пескострую при помощи быстросъема (входит в комплект). Прибор действует от воздуха от 2 до 5 кг/см<sup>2</sup> (30-120 psi). Очень важно чтобы воздух был сухим и

не содержал масла, обязательно установите фильтр влаги в систему нагнетания воздуха.

## Показания к применению

DENTO-PREP используется для подготовки и очистки:

- Поверхностей протезов перед фиксацией коронок, вкладок, накладок, ортодонтических конструкций.
- Непрямых металлических конструкций.
- Композитных и керамических конструкций.
- Ортодонтических брекетов.
- Для матовой финишной обработки литых металлических реставраций.

## Установка

Установка прибора возможна как в стоматологическом кабинете, так и в зуботехнической лаборатории. Для удобного использования прибора у кресла, существуют соединительные элементы (фитинги) для различных видов турбин: KaVo, W&H, Sirona, BienAir и NSK. Кроме этого есть самый распространенный фитинг к турбине MidWest.

## Рекомендуемый абразив

Оксид алюминия 20-80 микрон

Жидкость и инородные частицы могут вызвать блокировку прибора.

## Предостережения

Используйте защитные очки при использовании DENTO-PREP. Никогда не направляйте в глаза или в лицо, только точно на поверхность, которая требует обработки. Держите кончик насадки в 2-10 мм от поверхности, требующей обработки. Избегайте вдыхания абразива.

## Инструкции

- Открутите зарядный картридж для песка DENTO-PREP и заполните ее песком оксида алюминия и накрутите ее на место.
- Перед использованием DENTO-PREP впервые, рекомендуется потренироваться на различных металлах и керамике, композите предназначенных для стоматологии.
- Держите кончик насадки в 2-10 мм от поверхности, требующей обработки.
- Нажмите кнопку активации прибора и пескоструйте до необходимого уровня обработки поверхности. Требуется всего несколько секунд.
- После использования, снимите зарядный картридж для песка. Продуйте систему как описано ниже с разделе “Продувание”.
- Отсоедините пескоструй от системы.
- Очистите поверхности прибора. DENTO-PREP нельзя погружать в воду или иную жидкость.
- Стерилизовать в автоклаве при температуре до 135 C/275 F.

## Продувание

Если трубочки в приборе DENTO-PREP засорились, они могут быть прочищены продуванием:

Отсоедините зарядный картридж для песка, закройте подушкой пальца носик прибора и нажмите на кнопку активации.

При этом воздух под давлением продует прибор и устранил засоры.

## Очистка

После использования, снимите зарядный картридж для песка. Продуйте систему как описано в разделе “Продувание”. Отсоедините пескоструй от системы.

Очистите поверхности прибора. DENTO-PREP нельзя погружать в воду или иную жидкость.

## Гарантия

Гарантия на материал, из которого изготовлен прибор и на механизмы DENTO-PREP — 1 год, за исключением гарантии на накончник. RONVIG не несет никакой ответственности за повреждения и утерю вызванную неправильным использованием или отклонением от инструкций.

## Принадлежности для пескоструйного аппарата DENTO-PREP Dental Microblaster:

- 1) Распыляющая насадка
- 2) Фитинг и шланг длиной 3 м
- 3) Фитинг
- 4) Шланг длиной 1м
- 5) Зарядный картридж для песка (резервуар из матового стекла)
- 6) Крышка емкости для песка
- 7) Фитинг для шланга диаметра 5 мм
- 8) Фитинг для шланга диаметра 6 мм
- 9) Фитинг для шланга диаметра 8 мм
- 10) Фитинг Midwest / Midwest Connector
- 11) Фитинг «S»
- 12) Фитинг «W»
- 13) Фитинг «K»
- 14) Фитинг «B»
- 15) Фитинг «N»

## Производитель

RONVIG Dental Mfg. A/S, Дания  
Официальный эксклюзивный дистриьютор на территории СНГ – «АРКОМ»

АРКОМ-Санкт-Петербург ..... тел. (812) 336-77-17  
АРКОМ-Москва ..... тел. (495) 785-21-81  
АРКОМ-Екатеринбург ..... тел. (343) 383-40-65

АРКОМ-Самара ..... тел. (846) 276-69-05  
АРКОМ-Новосибирск ..... тел. (383) 354-99-82  
АРКОМ-Сочи ..... тел. (862) 254-75-39

[www.arkom-org.com](http://www.arkom-org.com)

**ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-700-25-25**