


Позиционеры DEXIS




DEXIS PLATINUM

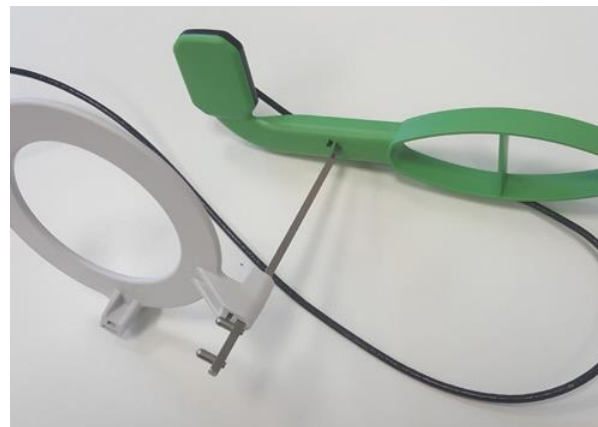

Снимки фронтальных и жевательных зубов

Необходимый
комплект

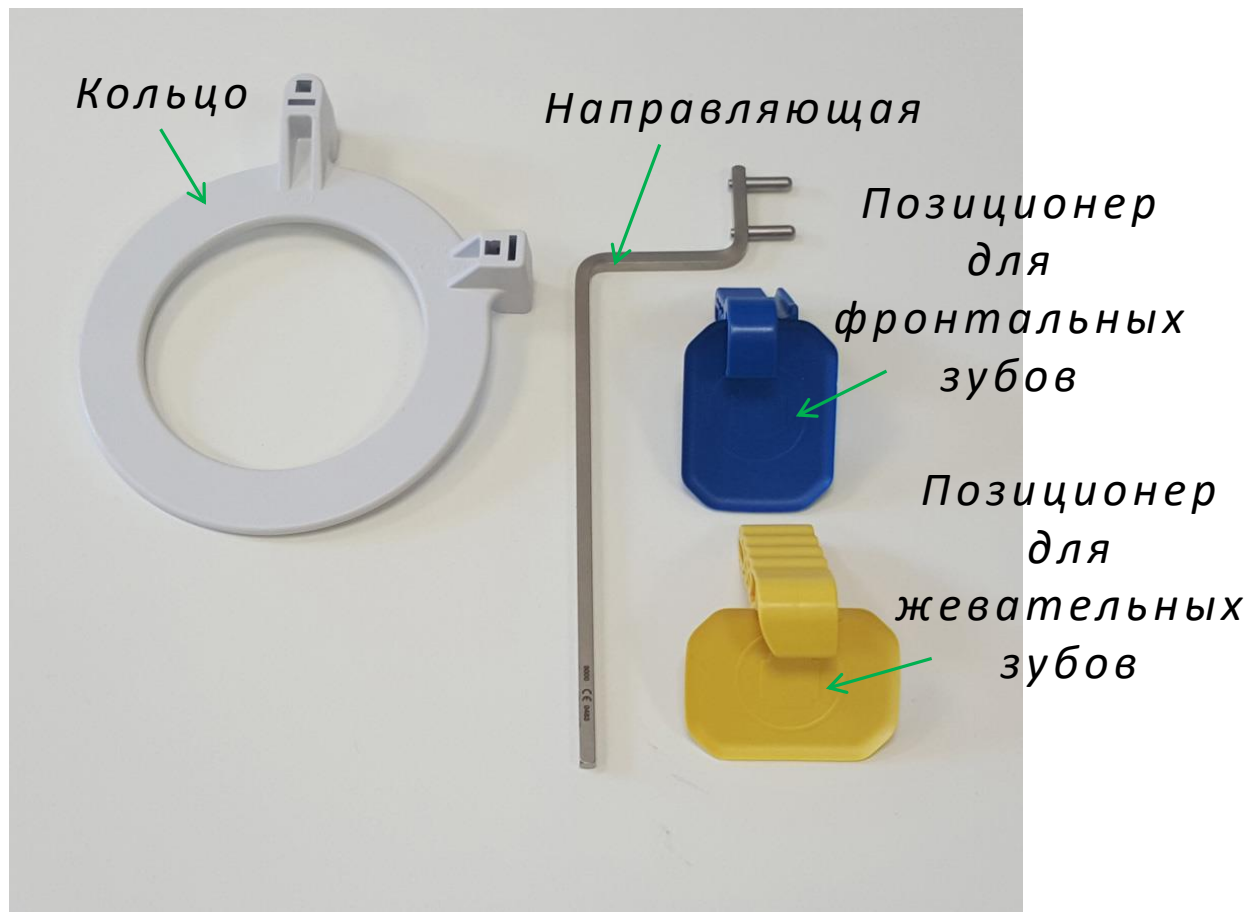


DEXIS PLATINUM



Снимки фронтальных и жевательных зубов

Для резцов

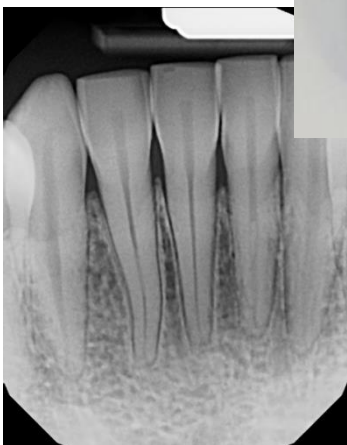

Для жевательных



DEXIS PLATINUM



Снимки жевательных зубов

Позиционер
для
жевательных
зубов
в сборе



DEXIS PLATINUM



Снимки фронтальных зубов

Позиционер
для
фронтальных
зубов
в сборе



DEXIS PLATINUM



Снимки фронтальных и жевательных зубов

Установка направляющей в кольцо.



DEXIS PLATINUM




Снимки фронтальных и жевательных зубов

Установка направляющей в кольцо.

Нечётная четверть



Чётная четверть

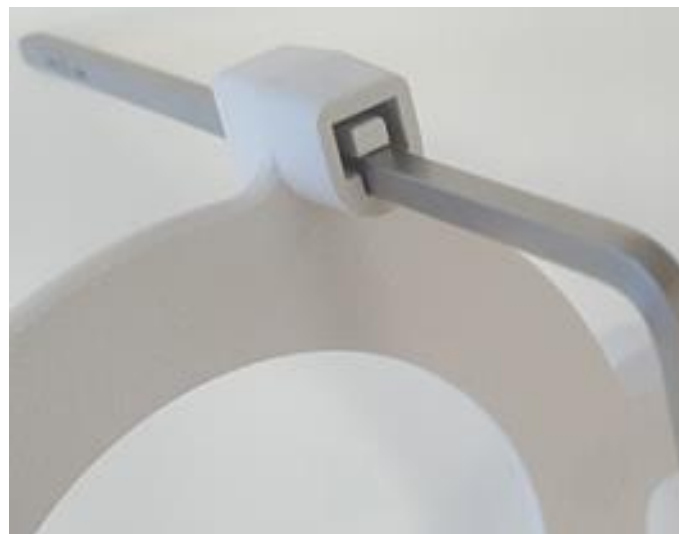

DEXIS PLATINUM



Снимки фронтальных и жевательных зубов

Установка направляющей в кольцо.



DEXIS PLATINUM



Снимки жевательных зубов

Установка позиционера в направляющую.




DEXIS PLATINUM



Снимки жевательных зубов

Установка позиционера в направляющую.

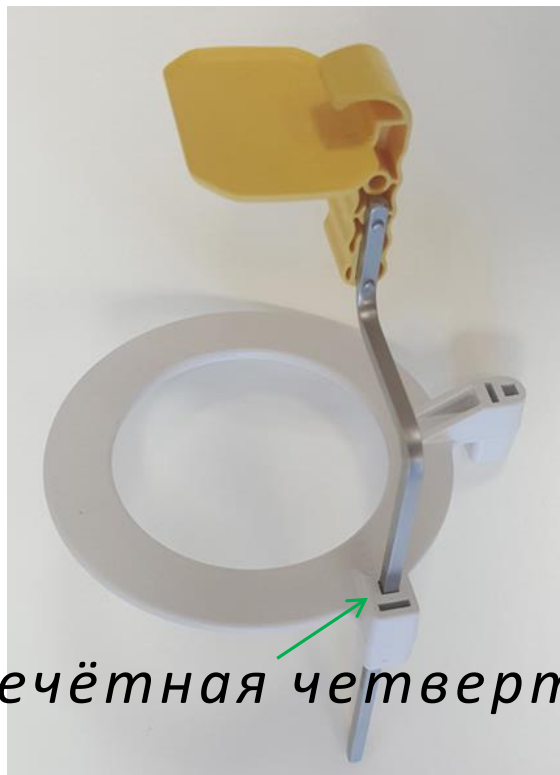

Нечётная четверть



Чётная четверть




DEXIS PLATINUM



Снимки жевательных зубов

Установка позиционера в направляющую.

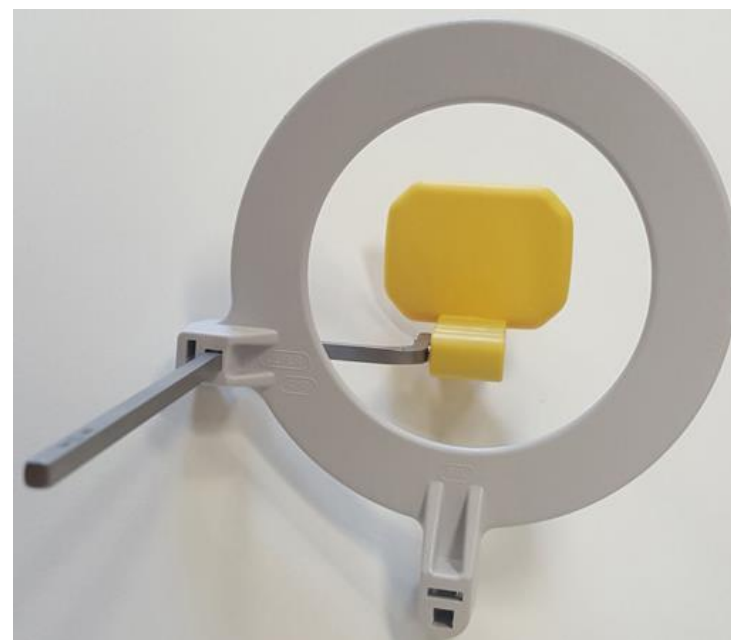


DEXIS PLATINUM



Снимки жевательных зубов

Установка датчика в позиционер.

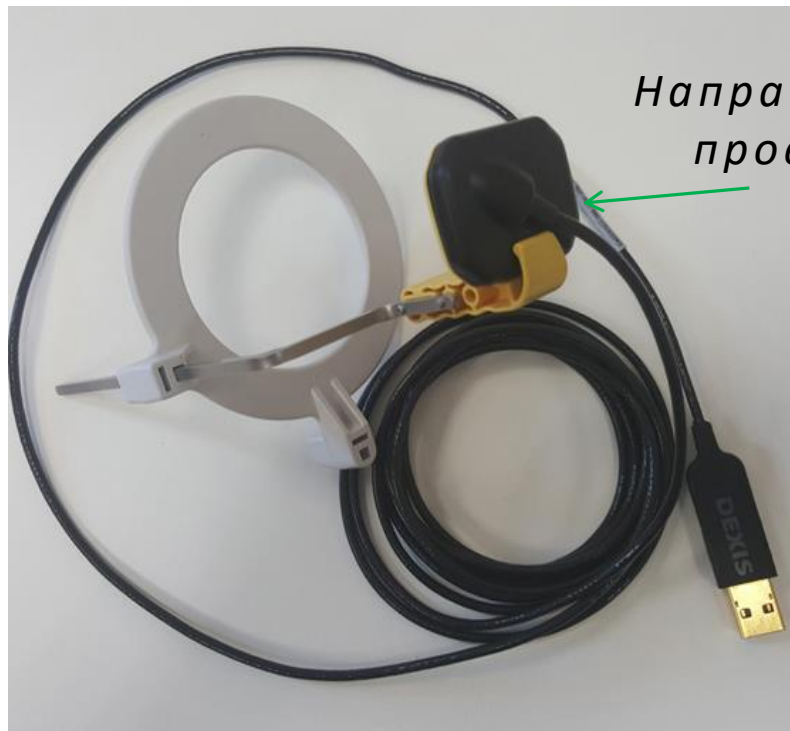

DEXIS PLATINUM



Снимки фронтальных зубов

Установка позиционера в направляющую.



DEXIS PLATINUM



Снимки фронтальных зубов

Установка датчика в позиционер.



DEXIS PLATINUM



Снимки межпроксимальные (прикусные)

Необходимый
комплект



DEXIS PLATINUM



Снимки межпроксимальные (прикусные)

Позиционер
для прикусных
снимков
в сборе





DEXIS PLATINUM



Снимки межпроксимальные (прикусные)

*для вертикальных
снимков*

*для горизонтальных
снимков*

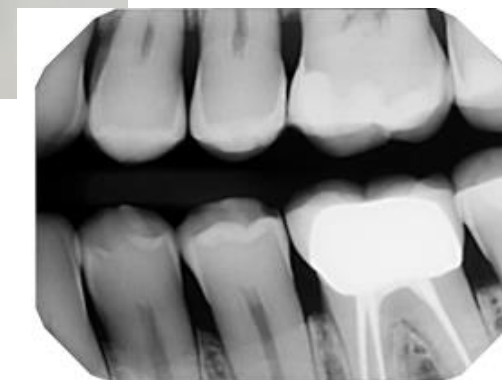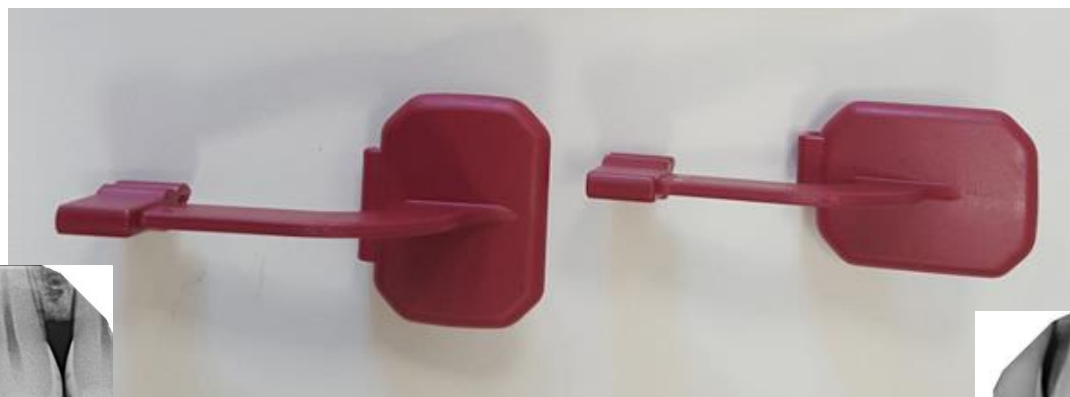

DEXIS PLATINUM



Снимки межпроксимальные (прикусные)

Установка направляющей в кольцо.



DEXIS PLATINUM



Снимки межпроксимальные (прикусные)

Установка позиционера в направляющую.

*для вертикальных
снимков*



*для горизонтальных
снимков*




DEXIS PLATINUM



Снимки межпроксимальные(прикусные)

Установка датчика в позиционер(вертик.).

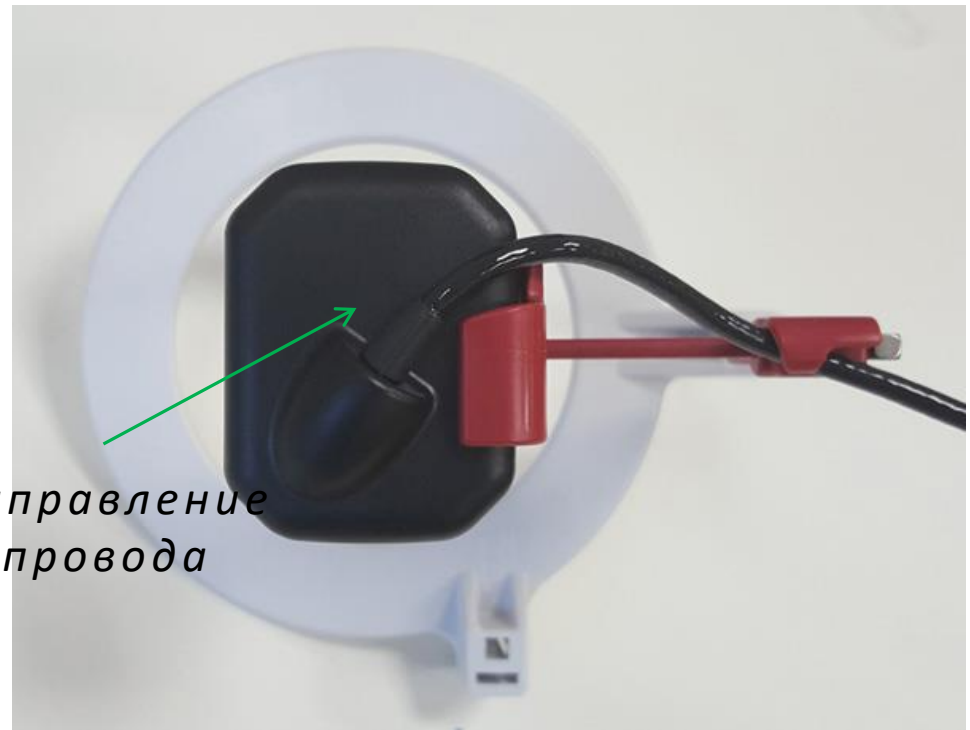

*Направление
провода*




DEXIS PLATINUM



Снимки межпроксимальные(прикусные)

Установка датчика в позиционер(горизонт.).

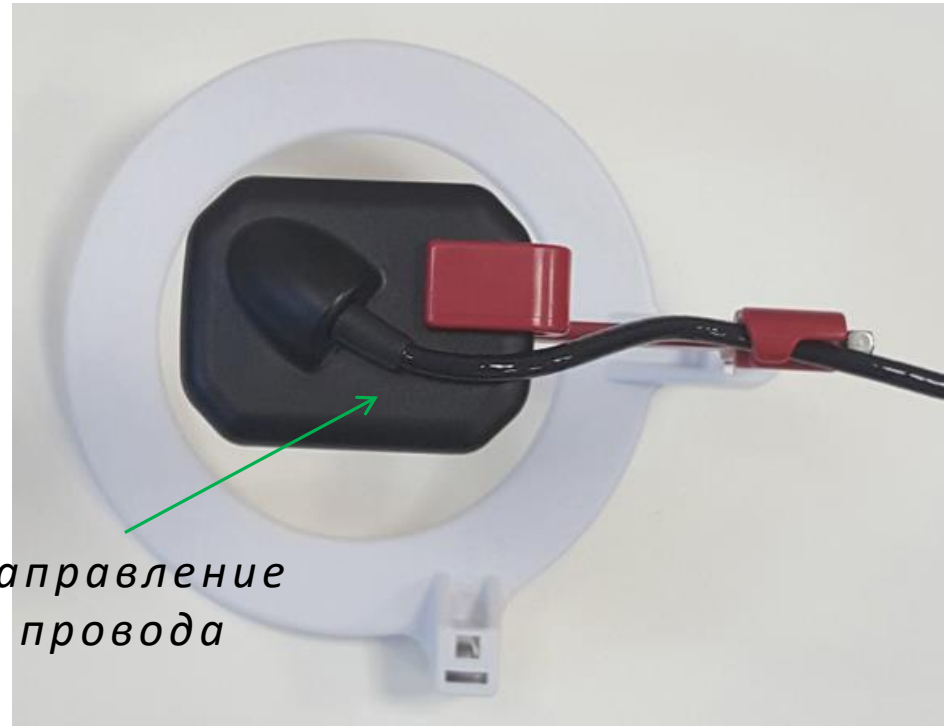


DEXIS PLATINUM



Снимки ручными позиционерами

Необходимый комплект

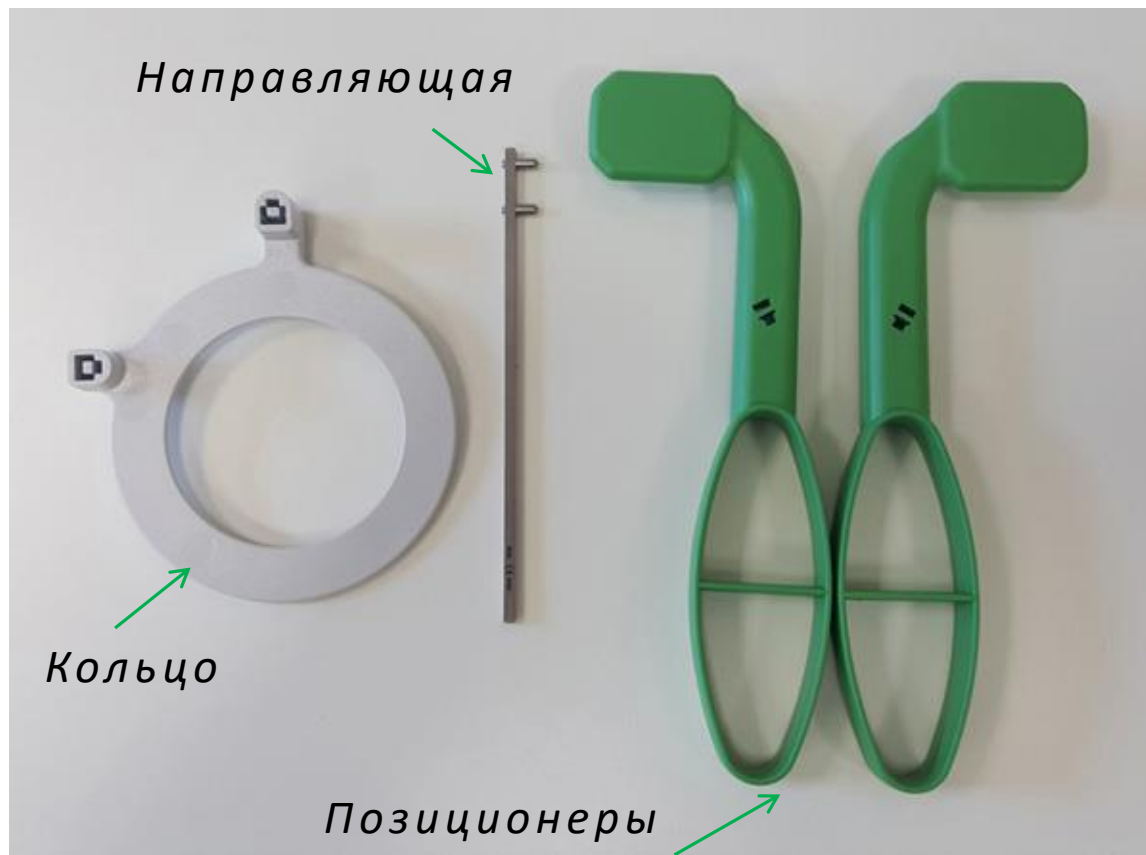


DEXIS PLATINUM



Снимки ручными позиционерами

Нечётные зубы

Чётные зубы

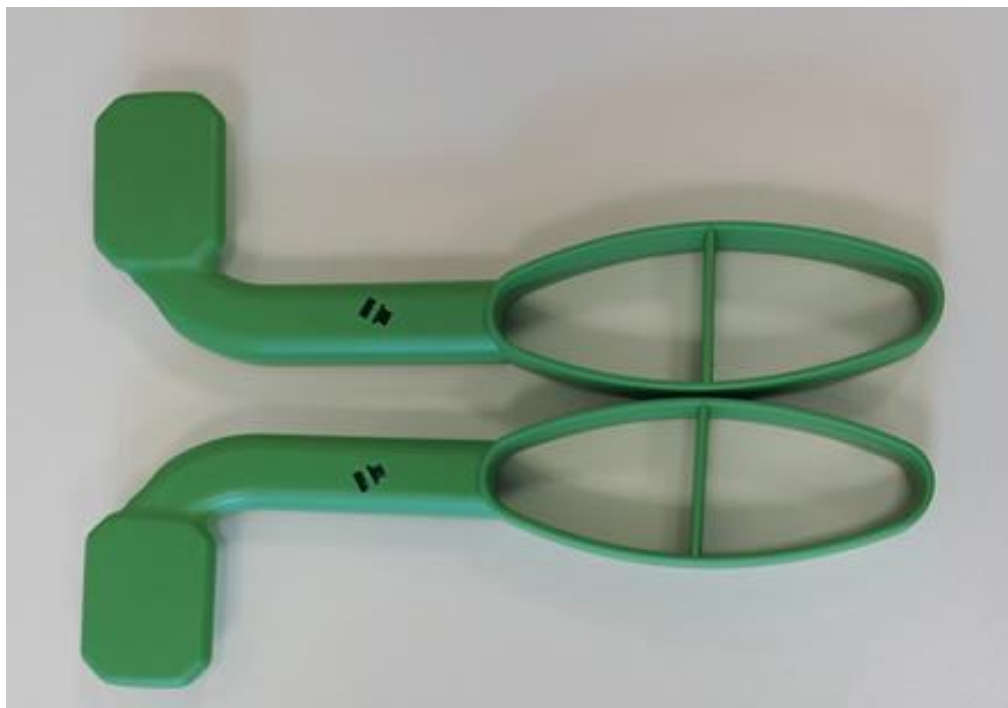

DEXIS PLATINUM



Снимки ручными позиционерами

Установка направляющей в кольцо.



DEXIS PLATINUM



Снимки ручными позиционерами


Установка позиционера в направляющую.



DEXIS PLATINUM





Снимки ручными позиционерами

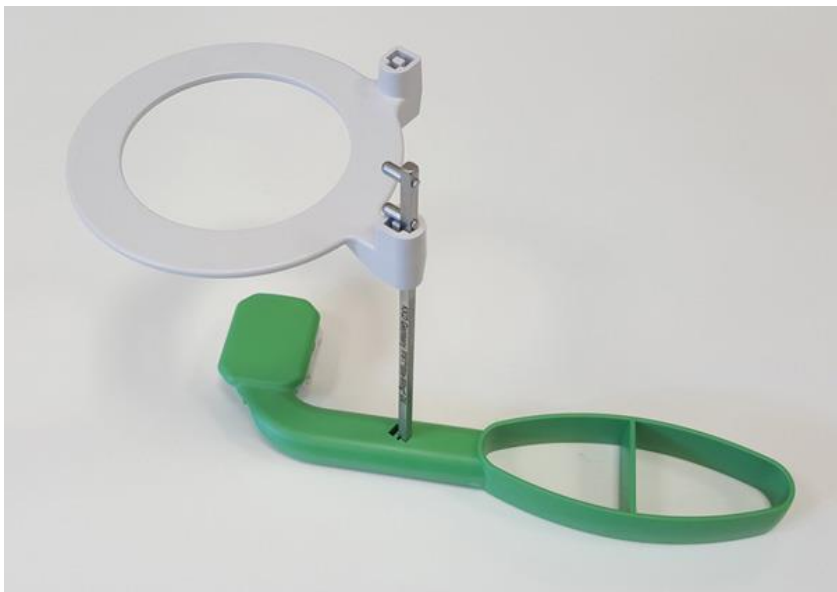

DEXIS PLATINUM




Снимки ручными позиционерами

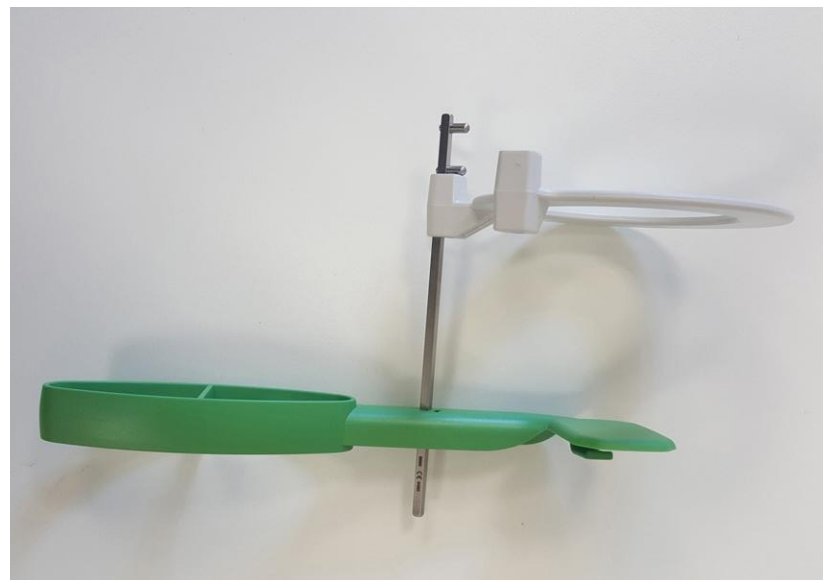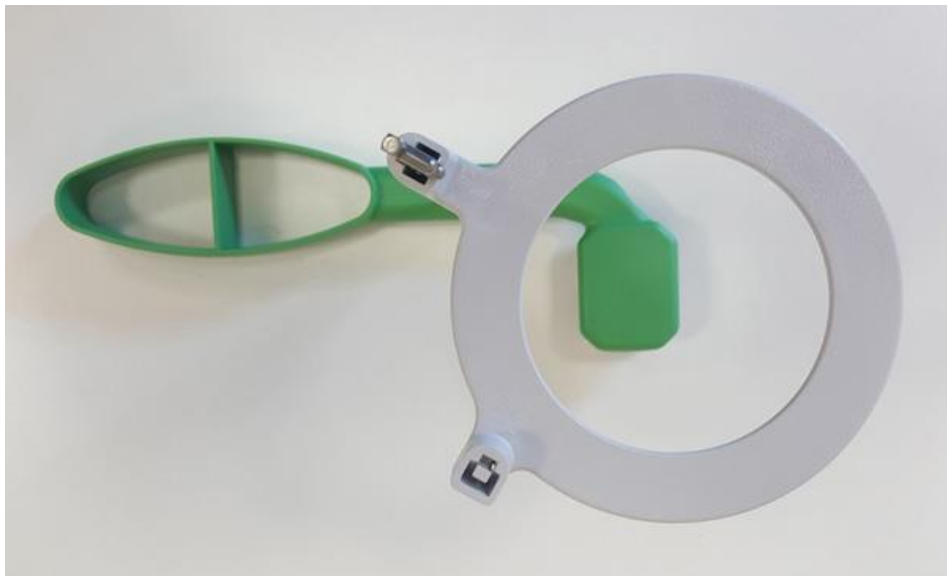

DEXIS PLATINUM



Снимки ручными позиционерами

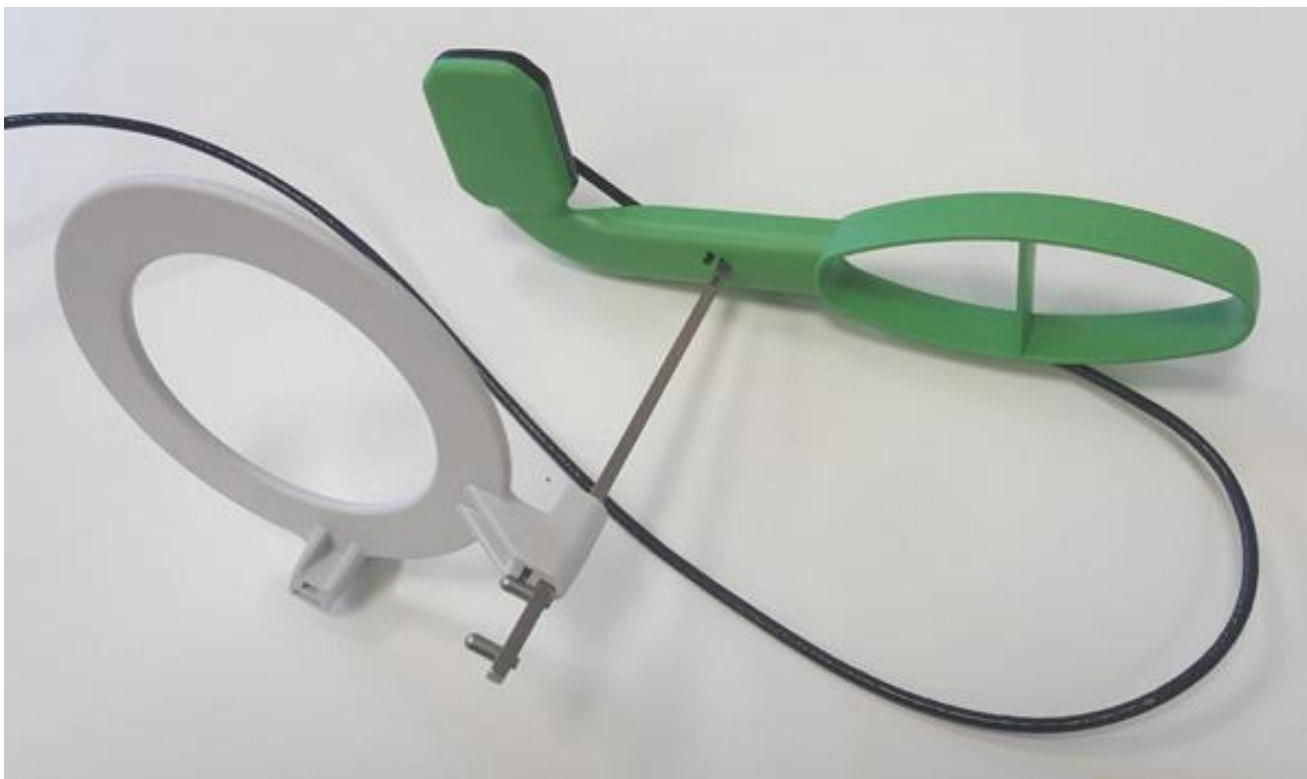

DEXIS PLATINUM

