







Стоматологические наконечники ЭУР-МЕД производятся фирмой ЭУР-МЕД Денталдепо на территории России. Фирма ЭУР-МЕД Денталдепо очень серьезно относится к вопросам качества изготовления инструментов и осуществляет очень качественный контроль в процессе производства и сборки наконечников, а так же контроль уже готовых изделий. Стоматологические наконечники марки ЭУР-МЕД отличает высокая надежность и долговечность эксплуатации.



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**

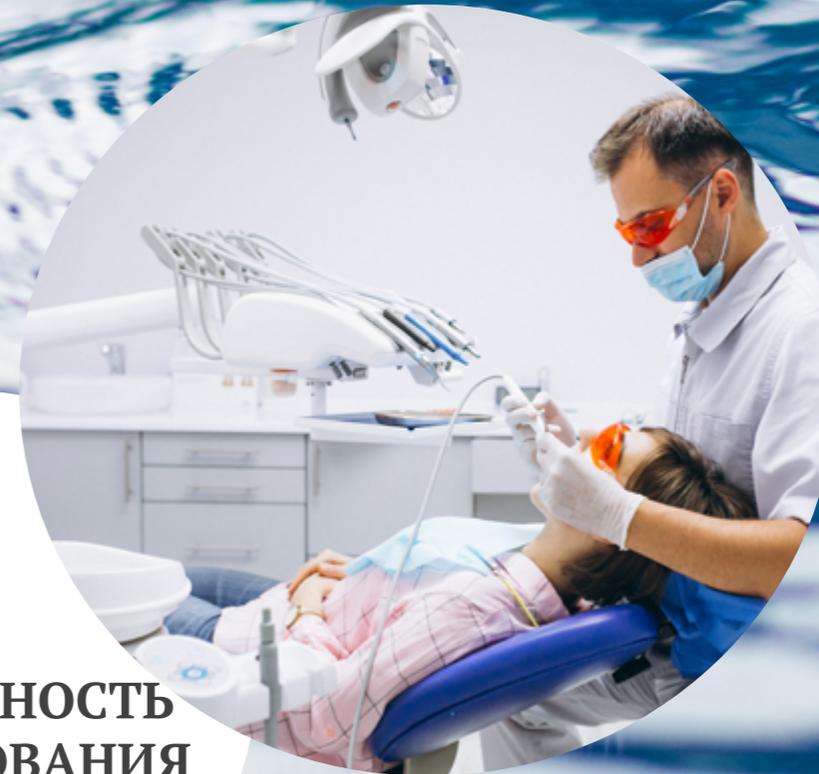

**ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

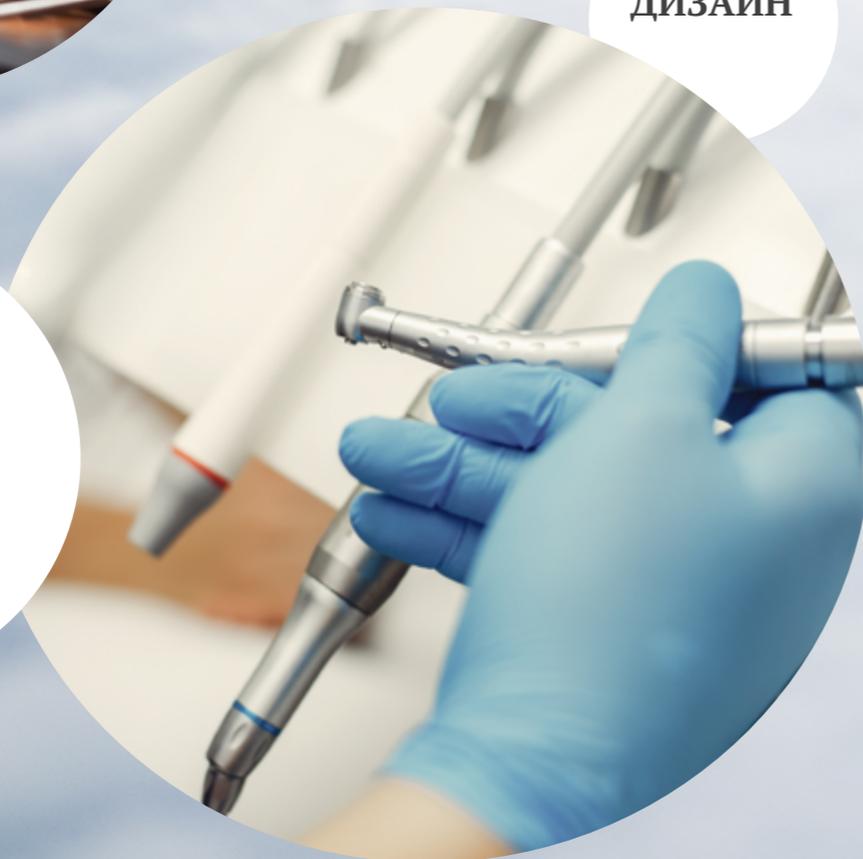

ДИЗАЙН

**КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА**



**ВЫСОКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ**

УС-001

Наконечник стоматологический угловой ЭУРМЕД УС-001 с подсветкой – работает от воздушного или электрического микромотора за счет передачи крутящего момента от вала микромотора к ротору головки наконечника, который, в свою очередь, вращает рабочий инструмент. Имеет трансмиссию 1:1 и обеспечивает скорость вращения до 40 000 об/мин. Имеет многообразие применяемых рабочих инструментов и видов движений при препарировании и обработке.

Наконечник стоматологический угловой ЭУРМЕД УС-001 с подсветкой в составе:

1. Наконечник угловой ЭУРМЕД УС-001
2. Инструкция по эксплуатации

Принадлежности:

1. Адаптер для смазки – 1 шт.
2. Бор-фантом – 1 шт.
3. Игла для чистки – 1 шт.



Технические характеристики медицинского изделия

Внешний вид и размеры варианта исполнения

Наконечник имеет трансмиссию 1:1, частота вращения мотора равна частоте вращения бора (промаркирован синей круговой полосой на рукоятке). Оснащен световодом, имеет двухточечную систему охлаждения. Принадлежность игла для чистки – тонкая металлическая игла используется для прочистки водо-воздушных каналов головки наконечника.

Характеристики наконечника

- Кнопочный зажим
- Световод
- Двухточечная система спрея
- Скорость вращения: до 40 000 об/мин
- Скорость подачи охлаждающей воды при давлении 200кПа: не менее 50 мл/мин
- Диаметр хвостовика рабочего инструмента: 2,35 мм, тип 1 в соответствии с нормами ГОСТ 26634-91.
- Усилие извлечения бора не менее 45 Н
- Уровень шума: не более 80дБ(А)
- Биение не более 0,08 мм
- Повышение температуры по сравнению с температурой окружающей среды: не более 20°С
- Трансмиссия 1:1, голубая маркировка

Безопасные комбинации с рабочими инструментами

Вариант исполнения	Наконечник стоматологический угловой ЭУРМЕД УС-001 с подсветкой
Тип совместимого хвостовика	Тип 1 в соответствии с ГОСТ 26634-91, \varnothing 2,35 мм

ПС-001

Наконечник стоматологический прямой ЭУРМЕД ПС-001 с подсветкой работает от воздушного или электрического микромотора за счет передачи крутящего момента от вала микромотора к ротору головки наконечника, который, в свою очередь, вращает рабочий инструмент. Имеет трансмиссию 1:1 и обеспечивает скорость вращения до 40 000 об/мин. Рабочие инструменты фиксируются цанговым зажимом.

Наконечник стоматологический прямой ЭУРМЕД ПС-001 с подсветкой в составе:

1. Наконечник прямой ЭУРМЕД ПС-001
2. Инструкция по эксплуатации

Принадлежности:

1. Адаптер для смазки – 1 шт.
2. Бор-фантом – 1 шт.
3. Игла для чистки – 1 шт.



Технические характеристики медицинского изделия

Внешний вид и размеры варианта исполнения

Наконечник стоматологический прямой ЭУРМЕД ПС-001 с подсветкой
Наконечник имеет трансмиссию 1:1, частота вращения мотора равна частоте вращения рабочего инструмента (промаркирован синей круговой полосой на рукоятке).

Характеристики наконечника

- Цанговый зажим
- Световод
- Двухточечная система спрея
- Скорость вращения: от 1000 до 40 000 об/мин
- Подача охлаждающей воды при давлении 200 кПа: не менее 50 мл/мин
- Диаметр хвостовика рабочего инструмента: 2,35 мм, тип 2 в соответствии с нормами ГОСТ 26634-91.
- Усилие извлечения бора не менее 45 Н
- Уровень шума: не более 80дБ(А)
- Прямой привод, голубая маркировка
- Биение не более 0,08 мм
- Повышение температуры по сравнению с температурой окружающей среды: не более 20°С

Безопасные комбинации с рабочими инструментами

Вариант исполнения	Наконечник стоматологический прямой ЭУРМЕД ПС-001 с подсветкой
Тип совместимого хвостовика	Тип 2 в соответствии с ГОСТ 26634-91, \varnothing 2,35 мм

ТС-001

Наконечник стоматологический турбинный ЭУРМЕД ТС-001 с подсветкой и быстросъемным переходником соединяется со шлангом стоматологической установки через быстросъемный переходник (разъем типа «Мидвест LUX» со светодиодом для подсветки). Приводится в движение потоком сжатого воздуха, который подается на ротор турбины, расположенный внутри головки наконечника. Скорость вращения до 300 000 об/мин.

Наконечник стоматологический турбинный ЭУРМЕД ТС-001 с подсветкой и быстросъемным переходником

в составе:

1. Наконечник турбинный ЭУРМЕД ТС-001
2. Переходник быстросъемный
3. Инструкция по эксплуатации

Принадлежности:

1. Переходник быстросъемный – 1 шт.
2. Набор колец – 5 шт. в упаковке
3. Бор-фантом – 1 шт.
4. Адаптер для смазки – 1 шт.



Технические характеристики медицинского изделия.

Внешний вид и размеры варианта исполнения:

В состав варианта исполнения входит быстросъемный переходник с четырехканальным разъемом «Мидвест LUX». Переходник предназначен для быстрой смены наконечника. (Рис 2)

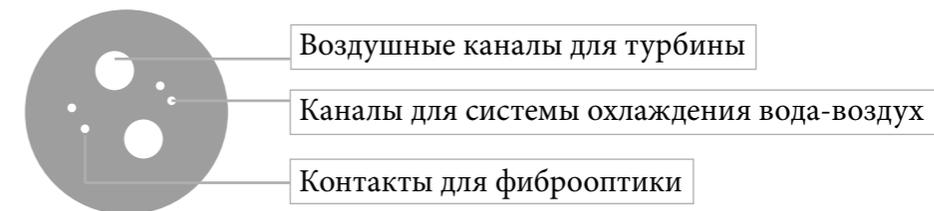


Рис. 2

Переходник быстросъемный накручивается на шланг стоматологической установки, затем переходник состыковывается с наконечником.

Характеристики наконечника:

- Кнопочный зажим
- Светодиодная подсветка, рекомендуемое напряжение постоянного тока $3,2 \pm 0,2$ В.
- Трехточечная система спрея
- Переходник быстросъемный
- Рабочее давление воздуха: 250-320 кПа
- Скорость вращения: до 300 00 об/мин
- Расход воздуха 35 л/мин
- Скорость подачи охлаждающего спрея при давлении 200кПа: не более 15 дм³/мин
- Диаметр хвостовика: 1,6 мм, тип 3 в соответствии с нормами ГОСТ 26634-91
- Длина рабочего инструмента: 21-23 мм
- Усилие для извлечения рабочего инструмента: не менее 22 Н
- Уровень шума: не более 80дБ(А)
- Биение без нагрузки: не более 0,03 мм

Безопасные комбинации с рабочими инструментами:

Вариант исполнения	Наконечник стоматологический турбинный ЭУРМЕД ТС-001 с подсветкой и быстросъемным переходником
Тип совместимого хвостовика	Тип 3 в соответствии с ГОСТ 26634-91, ϕ 1,6 мм



T-001

Наконечник стоматологический турбинный ЭУРМЕД Т-001 соединяется со шлангом стоматологической установки с разъемом типа «Мидвест» без фиброоптики с резьбовым соединением. Приводится в движение потоком сжатого воздуха, который подается на ротор турбины, расположенный внутри головки наконечника. Скорость вращения до 300 000 об/мин.

Наконечник стоматологический турбинный ЭУРМЕД Т-001

в составе:

1. Наконечник турбинный ЭУРМЕД Т-001
2. Инструкция по эксплуатации

Принадлежности:


1. Бор-фантом – 1 шт.
2. Игла для чистки – 1 шт.



Технические характеристики медицинского изделия

Внешний вид и размеры варианта исполнения

Наконечник имеет четырехканальный разъем «Мидвест» без фиброоптики и соединяется непосредственно со шлангом стоматологической установки.

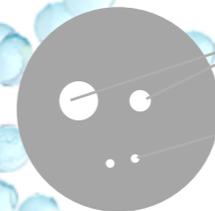

Воздушные каналы для турбины

Каналы для системы охлаждения вода-воздух

Характеристики наконечника

- Кнопочный зажим
- Трехточечная система спрея
- Рабочее давление воздуха: 250-320 кПа
- Скорость вращения: 300 00 об/мин
- Расход воздуха 35 л/мин
- Скорость подачи охлаждающего спрея при давлении 200кПа: не более 15 дм³/мин
- Диаметр хвостовика: 1,6 мм, тип 3 в соответствии с нормами ГОСТ 26634-91
- Длина рабочего инструмента: 21-23 мм
- Усилие для извлечения бора: не менее 22 Н
- Уровень шума: не более 80дБ(А)
- Биение без нагрузки: не более 0,03 мм

Безопасные комбинации с рабочими инструментами

Вариант исполнения	Наконечник стоматологический турбинный ЭУРМЕД Т-001
Тип совместимого хвостовика	Тип 3 в соответствии с ГОСТ 26634-91, \varnothing 1,6 мм



UC-001

№ UC-001
Тип угловой
Трансмиссия 1:1
Скорость вращения 40 000 об/мин.
Давление приводного воздуха 2,1 - 2, 8 бар
Подшипники керамические
Освещение без подсветки
Тип головки стандартный
Покрытие хром
Охлаждение 4 канала



PC-001

прямой
1:1
40 000 об/мин.
2,1 - 2, 8 бар
керамические
без подсветки
стандартный
хром
4 канала



TC-001

турбинный с подсветкой и быстросъемным переходником» со светодиодом для подсветки
1:1
300 000 об/мин.
250 -320 кПа
керамические
с подсветкой
стандартный
хром
4 канала



T-001

турбинный , без фиброоптики с резьбовым соединением.
1:1
300 000 об/мин.
250 -320 кПа
керамические
с подсветкой
стандартный
хром
4 канала



АО «ЭУР-МЕД Денталдепо»
143360, Московская область,
г. Апрелевка, ул. Октябрьская, 9
тел.: (496) 341-16-90,
тел.: (496) 345-00-46
email: info@eurmed.ru

ООО «ЭУР-МЕД Центр»
117246, г. Москва,
Научный пр-д., дом 19, офис 7
тел.: (495) 228-32-40
моб.: 8 (926) 903-71-49
email: shop@eurmed.ru

www.eurmed.ru

<https://stomshop.pro>