

Инструкция по эксплуатации бестеневого налобного осветителя ITS-X.PRO

1. Описание

Осветитель налобный бестеневого освещения ITS-x.pro предназначен для дополнительной подсветки мало-освещённых участков объекта исследования. Осветитель представляет собой два источника света, закрепленных на пластиковой регулируемой эргономичной дуге. Осветитель состоит из блока осветителя и блока питания, закреплённых с разных сторон пластиковой эргономической дуги.

2. Комплектации

состав \ модель	ITS-10	ITS-11	ITS-12
Бестеновой осветитель	*	*	*
Аккумуляторная батарея	*	*	*
Блок зарядки	*	*	*
Светофильтры	*	*	*
Упаковочная сумка	*	*	*
Инструкция по эксплуатации	*	*	*
Линзы в оправе		*	
Биноклярные лупы			*

3. Использование

- вставьте литиевую батарею в специальный отсек, расположенный на затылочной стороне дуги.
- проверьте включение светильника путем опускания модуля освещения в нижнее положение.
- эргономическую дугу отрегулируйте по размеру головы пользователя с помощью гребенчатого ползунка.
- отрегулируйте яркость свечения можно вращением регулировочного колеса расположенного с верхней правой стороны аккумуляторного отсека.
- запрещается прикладывать чрезмерное усилие к подвижным механизмам и деталям осветителя!

4. Меры предосторожности

- Избегайте излишнего давления на детали осветителя в процессе настройки.
- Избегайте попадания влаги в отсек с аккумулятором.

5. Устранение неисправностей

	неисправность	причина	метод устранения
1	Низкий уровень яркости при регулировании до мах	Разрядился аккумулятор	Зарядить в зарядном устройстве
2	Не заряжается аккумулятор	Неисправность кабеля зарядки	Заменить кабель на исправный

Устройство осветителя

