




JG-212 Гидравлический пресс

1. Модель: JG-212

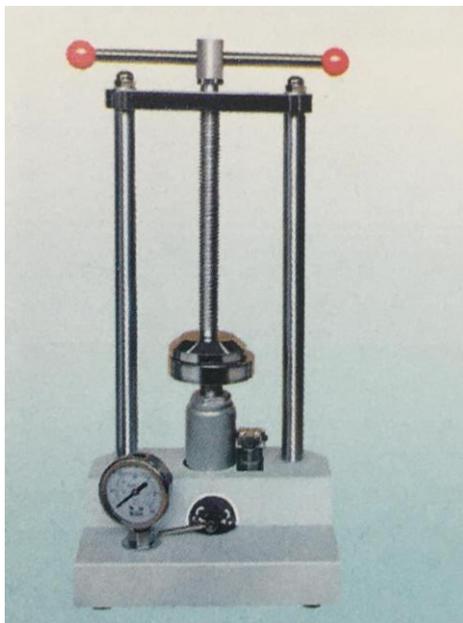

2. Руководство по эксплуатации

- 1) Поверните регулятор давления в положение высокого давления.
- 2) Отрегулируйте высоту платформы по своему усмотрению.
- 3) Установите пресс-форму и придавите кювету с помощью ручного рычага давления.
- 4) Используйте гидравлический рычаг для увеличения давления до необходимого уровня.
- 5) Переведите переключатель давления в положение низкого давления, отпустите рычаг давления, чтобы вынуть кювету.

3. Технические характеристики

Давление	20 МПа
Высота	180 мм
Вес (брутто)	23 кг

4. Меры предосторожности

Выходное давление гидравлической системы должно быть ниже 20 МПа. Не превышайте избыточное давление при использовании, чтобы не повредить манометр и другие системы. Обычное давление составляет 20 МПа.