




JG-217 – прибор для внутренней обработки гипсовых моделей: Руководство по эксплуатации

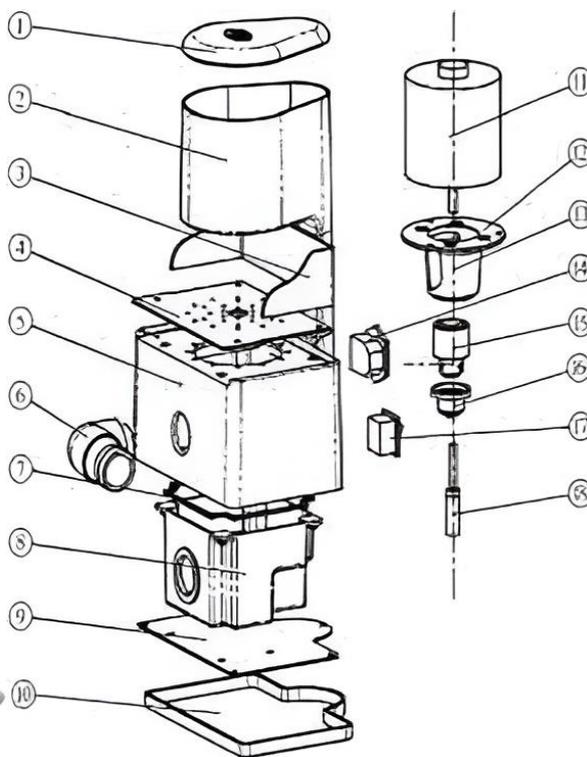

№	Перечень деталей	КОЛ.
1	Верхняя крышка	1
2	Верхняя часть	1
3	Пылезащитная пластиковая рама	1
4	Рабочая панель	1
5	Нижняя часть	1
6	Согнутая трубка для сбора пыли	1
7	Уплотнительная резинка	1
8	Встроенный контейнер для сбора порошка	1
9	Нижняя пластина	1
10	Прорезиненное дно	1
11	Двигатель	1
12	Р Подшипник скольжения	1
13	Резьбовая заглушка	1
14	Муфта	1
15	Патрон	1
16	Резиновая втулка	1
17	Выключатель питания	1
18	Вращающийся напильник	1

Источник питания: 220 В/50 Гц (110 В/60 Гц)

Мощность: 100 Вт

Скорость вращения: 4500 об/мин

1. Пожалуйста, проверьте, работает ли он в нормальном режиме после включения питания. Если нет, проверьте, сработал ли встроенный в розетку предохранитель. Если да, пожалуйста, немедленно замените его (10 А).

2. Передняя часть вращающегося напильника должна быть ниже рабочего стола на 0,5-1 мм, что обеспечивает эффективное шлифование.

3. Если вы хотите заменить вращающийся напильник или отрегулировать его высоту, пожалуйста, поверните пылезащитную маску на 90°, двумя гаечными ключами возьмитесь за верхний и нижний шпindel соответственно и плотно сожмите внешний край резьбовую заглушку, чтобы затянуть или ослабить ее. После работы снова снимите пылезащитную маску.

4. Установите трубку для сбора пыли в горловину пылесборника, чтобы работать вместе с пылесборником, а секцию для сбора пыли - с очистителем. Если длительная работа ведет к чрезмерному образованию пыли внутри контейнера, пожалуйста, сначала освободите нижнюю пластину, затем контейнер для порошка и очистите его.

5. Пожалуйста, уделяйте внимание безопасности работы:

1) Никогда не прикасайтесь к вращающемуся напильнику, когда устройство используется;

2) Никогда не работайте с устройством в перчатках