

# Настройка протрузии/ретрузии/ дистракции на артикуляторе Protar 9





Нейтральная (нулевая) позиция:  
Черный указатель расположен  
напротив значения „0“



Ретрузия:

Черный указатель установлен напротив значения „R” Центральный замок открыт. Возможно установка движения назад на величину до 0,5 мм. Угол сдвига должен быть установлен в максисмальную позицию 1,5 мм.

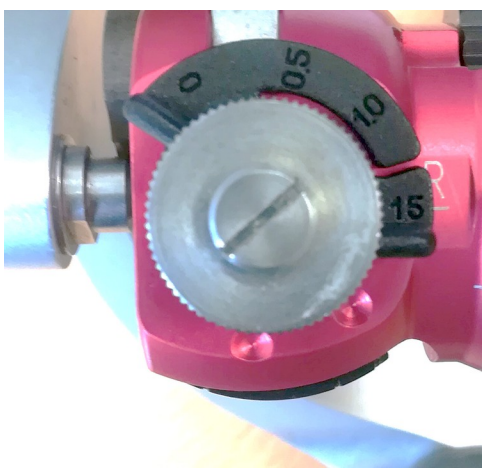

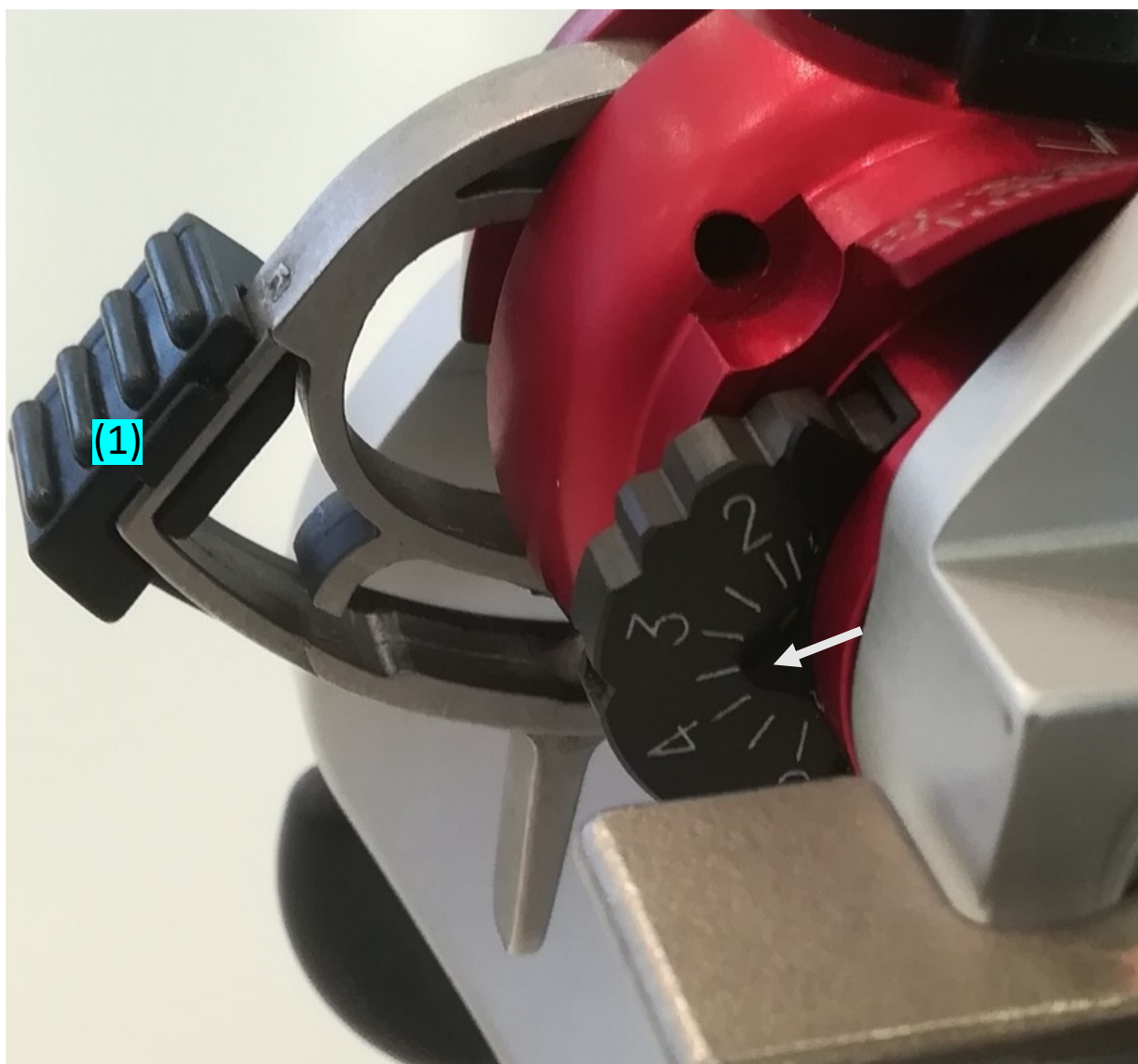

Протрузия:

(1) Центральный замок должен быть открыт. Протрузия может быть установлена до значения в 6 мм. На этом примере значение протрузии составляет 3,5 мм.



Дистракция:  
Сагитальный суставной путь должен быть установлен до значения „D“. В этой позиции суставная коробка двигается вверх на 90°. Центральный замок открыт. Пример: значение дистракции установлена на 2 мм.

