


Opalescence®
trèswhite®
••••• SUPREME

Opalescence®

С СИЯЮЩЕЙ УЛЫБКОЙ

ВЫ ГОТОВЫ К НОВЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

- Эффективное отбеливание в домашних условиях с 10% H₂O₂
- Комфортное применение прямо из упаковки
- Капа UltraFit обеспечивает идеальную посадку и легко адаптируется к индивидуальной улыбке пациента – комфортная процедура отбеливания

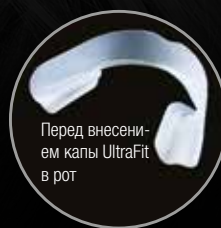

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence®
trèswhite®
•••••
SUPREME



Opalescence® Trèswhite® Supreme 10%

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПОЛНЕННЫЕ КАПЫ ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ - ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА



- Отбеливание с помощью готовых кап
- Профессиональный результат по доступной цене
- Никаких оттисков, моделей и работы лаборатории
- Гладкие и удобные; подходит к любой улыбке
- Незаметный прозрачный материал каппы
- 10% - носите всего 30-60 минут
- Формула PF укрепляет эмаль, уменьшает чувствительность, предотвращает кариес^{2,3,4,5,6}

Области применения

"Bleaching to go" – в любое время и в любом месте. Готовые к применению предварительно наполненные капсы, содержащие гель на основе 10% или 15% перекиси водорода, - это идеальный способ профессионального отбеливания зубов. Этот метод наиболее экономичный, так как не требует оттисков, моделей и оплаты работ лаборатории. Особо рекомендуется для освежения цвета зубов после их профессиональной очистки, а также для закрепления и продления эффекта кабинетного отбеливания.

Инструкции



1. Выньте из упаковки.



2. Выверните капсу по центру зубного ряда.



3. Медленно втяните воздух или сглотните.



4. Снимите внешнюю капсу.



5. Снова втяните воздух или сглотните.



6. Носите капсу 10% 30–60 минут.

До и после



До.



После применения десяти кап с Opalescence Trèswhite Supreme.



До.



После применения десяти кап с Opalescence Trèswhite Supreme.



До.



После применения шести кап с Opalescence Trèswhite Supreme.

Courtesy of Dr. Lara Miller

Гель Opalescence PF с 10% перекисью водорода для выдающихся результатов



Мягкий, тонкий, гибкий материал капы адаптируется к анатомии зубов для более комфортной посадки

Стабилизирующая капа только для введения и размещения

Превосходная адаптация капы UltraFit™ к анатомии зубов.



Капа UltraFit до применения.



Капа UltraFit после 10 минут пребывания во рту.

Patient Kit

10 блистерных упаковок по 1 капле для верхнего и нижнего зубного ряда

5703 Мята 10%



Хранить в холоде.

SixPack (6 штук)

6 наборов Patient Kit (содержимое, как указано выше)

5706 Мята 10%
5707 Дыня 10%



Хранить в холоде.



1 www.realityesthetics.com 2 Basting RT, et al: The Effects of Seven Carbamide Peroxide Bleaching Agents on Enamel Microhardness Over Time, J Am Dent Assoc. 2003 Oct; 134(10):1335-42. 3 Al-Qunaihan TA, The Effect of Whitening Agents on Caries Susceptibility of Human Enamel, Oper Dent. 2005 Mar-Apr;30(2):265-70. 4 Clark LM et al: Influence of Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel on Enamel Demineralization. (AADR Abstract #0497), 2006. 5 Amaechi BT et al: Enamel Fluoride Uptake from Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel (AADR Abstract #0498), 2006. 6 Browning WD et al: Report on Low Sensitivity Whiteners, (AADR Abstract #1650), 2006.