



ВИБРОСТОЛИК ПОРТАТИВНЫЙ ВБ 1.1 «АВЕРОН»



Рег. удостоверение №РЗН 2014/1542 от 28.03.2014

Этикетка
АВЕ 229.000.000 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Вибростолика портативного ВБ 1.1 «АВЕРОН» требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ВБ 1.1	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п.
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Вибростолика портативного ВБ 1.1 «АВЕРОН» (далее - **ВБ**), ТУ 9452-022-52331864-2013, ОКП 94 5220.

1.2 **ВБ** используется в лабораториях для удаления пузырьков воздуха из формовочной массы в процессах отливки моделей, заливки гипса и паковки литейных опок. В **ВБ** предусмотрена регулировка амплитуды колебаний.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более 80 %

1.4 Основные технические характеристики

- режимы вибрации 3000, 6000 мин⁻¹
- размеры рабочей поверхности столика 185×135 мм
- электропитание* ~220В 50Гц 0,5А
- габариты (ШхВхГ), не более 205×106×160 мм
- масса, не более 5,2 кг

* - вставка плавкая ВП4-3-1А-250В – 1 шт

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вибростолик 1 шт

Этикетка АВЕ 229.000.000 ЭТ 1 шт

- инфракрасный (ИК) датчик включения/выключения вибрации БЛИК 2.0 СЕНСОР*
- емкость (500 мл) с трубкой и мерным градуированным контейнером (50 мл), для ручного дозирования воды при заливке гипса и паковочных масс ДОЗАТОР 0.5 ПЛЮС*

- поставка по дополнительной заявке

3 УСТРОЙСТВО

3.1 Основные элементы

1 – рабочая поверхность (резиновая накладка)

2 – опорная дуга

3 – переключатель режимов вибрации:

I – 3000 мин⁻¹;

0 – 0;

II – 6000 мин⁻¹

4 – ручка регулировки амплитуды колебаний



Рис.1

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для повышения эффективности ручка слепочной ложки зубного ряда размещается на опорной дуге (2), которая вибрирует вместе с рабочей поверхностью (1).

Вставить вилку сетевого шнура в розетку и включить переключатель (3).

Вращение ручки (4) по часовой стрелке (к черной метке) – увеличение амплитуды, против часовой (к белой метке) – уменьшение.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

* - Эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

Для автоматического включения вибрации только на время нахождения заливаемой формы (слепочной ложки, кюветы, опоки и пр.) на рабочей поверхности (1), когда руки заняты, предназначен ИК-датчик (5). Пример его размещения рядом с ВБ см. на рис.2. После установки необходимо проверить и, если требуется, подстроить дальность срабатывания ИК-датчика, согласно его сопроводительной документации.



Рис.2

Внимание !



При длительной непрерывной работе возможно отключение ВБ из-за срабатывания тепловой защиты.

Для возобновления работы ВБ необходимо выключить на 10...15 минут, переведя переключатель режимов вибрации в положение «0».

Во избежание повреждения сетевого шнура не прижимать его (и его выход из ВБ) вплотную к каким-либо объектам.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование ВБ проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50 °С, относительная влажность до 100 % при температуре 25 °С.

5.2 ВБ должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С.

Не допускается хранение ВБ совместно с кислотами и щелочами.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей ВБ от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

В случае сильного загрязнения рабочей поверхности снять резиновую накладку, промыть и **после полного высыхания** надеть обратно на металлическую платформу.

Внимание !





Не допускать попадания влаги на металлическую платформу и внутрь ВБ.

Запрещается работа без резиновой накладки.

Для уменьшения загрязнений ВБ, в т.ч. накладки (1) и переключателя (3), рекомендуется защита в виде надетой сверху медицинской бахилы, с заменой ее по мере необходимости.

7 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Что делать
Отсутствует вибрация рабочей поверхности	Неисправный переключатель режимов вибрации	
	Сгорел плавкий предохранитель	

Примечание:  - обратитесь к продавцу или в ближайшее сервисное представительство изготовителя.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ВБ** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ВБ** не требуется.

9 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **ВБ**.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20

тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72

сервис-центр: тел. (343) 234-66-23