

Ежемесячно	Протирка от пыли поверхности лампы	Сохранение уровня выхода бактерицидного потока	Салфетка х/б
Через 8000 ч. работы лампы	Замена бактерицидной лампы-«облучателя»	Обеспечение бактерицидного воздействия	

#### Технические неисправности и методы устранения

Обнаружение неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Обнаружение характерного запаха озона	Озонирует лампа-«облучатель»	Заменить лампу
Нарушение целостности лампы-«облучателя»	Озонирует лампа-«облучатель»	Замена лампы и демеркуризация помещения

#### 8. Сведения об утилизации

Бактерицидные лампы, отслужившие свой срок или вышедшие из строя, должны храниться в таре завода изготовителя или другой таре, исключающей повреждение стеклянной колбы. Упакованные бактерицидные лампы должны храниться в отдельном помещении исключающем доступ посторонним лицам. Утилизация бактерицидных ламп должна производиться аккредитованными в установленном порядке, специализированными организациями в соответствии с природоохранным законодательством.

#### 9. Сведения о хранении

Набор мебели или отдельные изделия в упаковке предприятия изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +5° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70% включительно не более 5 лет.

#### 10. Сведения о приемке

Изделие соответствует ТУ 9452-001-77929798-2009 и признано годным к эксплуатации.

Шифр изделия \_\_\_\_\_ Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

#### 11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения – 1 год.

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

#### 12. Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию изготовителю по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул. Шефская 3А, литер 9. ООО «ТПК «Виталия»

## Набор мебели «Виталия» для хранения стерильного инструмента

### Паспорт

ТУ 9452-001-77929798-2009

**ООО «ТПК «Виталия» 620017, Свердловская область,  
г.Екатеринбург ул. Шефская 3А, Литер 9 и 10**

<https://stomshop.pro>

